



Etac Alto

Fauteuil de douche et de toilettes motorisé

Améliorer l'expérience des soins

Alto est un fauteuil de douche et de toilettes compact, motorisé, mobile, réglable en hauteur et inclinable, qui peut être utilisé pour la douche, les toilettes et le transfert. Il est conçu en tenant compte des besoins du personnel soignant et des utilisateurs, ce qui le rend parfaitement adapté à divers environnements, y compris aux soins à domicile, aux hôpitaux et aux établissements de soins de longue durée.



Ouvrir la voie à la dignité et à l'autonomie

L'espace exigu des salles de bains constitue un défi et conduit souvent à choisir les dispositifs d'assistance en fonction des contraintes plutôt que des besoins individuels et, par conséquent, oblige à des compromis. Les soignants sont confrontés à des tâches physiquement exigeantes et passent beaucoup de temps dans de mauvaises positions, ce qui peut entraîner des blessures.

Conçu pour les petites superficies, Alto offre un accès facile, ce qui simplifie les soins et évite les rénovations coûteuses. Les soignants ont moins d'effort à fournir et sont moins exposés aux risques de blessures, ce qui se traduit par des soins de meilleure qualité qui respectent davantage la dignité.

Présentation des fonctionnalités

Un fauteuil doté d'une excellente maniabilité et offrant un accès à 360 degrés, spécialement conçu pour faciliter le travail du soignant lors des soins personnels, tout en garantissant le confort de l'utilisateur.

Repose-tête multipositions

Conçu pour offrir un maximum de confort et de flexibilité. Peut être réglé pour répondre aux différents besoins des utilisateurs.

Largeur réglable

Les accoudoirs et repose-jambes réglables offrent plus d'espace.

Télécommande intuitive

Télécommande facile à utiliser, dotée de six boutons et d'un indicateur de batterie.

Assise avec ouverture à l'arrière

Accès facilité.

Réglages de la hauteur et de l'inclinaison dissociés

Peut être facilement réglé dans la position souhaitée.

Nettoyage facile

IP46, matériau non corrosif et peu de pièges à saletés.

Faible encombrement

Passage facile dans les portes standard.

Conception épurée

Ouvert sur les côtés pour faciliter l'accès.

Batterie puissante

La batterie, de grande puissance, a une capacité de 70 à 100 cycles d'utilisation.

Petit rayon de braquage

Pour manœuvrer facilement dans les espaces restreints.



Alto

Alto est un fauteuil motorisé, réglable en hauteur et inclinable. Il offre une maniabilité exceptionnelle et un accès ergonomique à 360 degrés qui réduisent le risque de blessures pour le personnel soignant.

Accès ergonomique pour le personnel soignant

Facilite la routine des soins d'hygiène dans son ensemble, sans effectuer de tâches physiquement exigeantes, sans s'étirer ni adopter de postures inconfortables pouvant entraîner des blessures liées au travail.

Facile à manœuvrer et à utiliser

Permet le transport d'une seule main de l'utilisateur vers, depuis et dans la salle de bains. Le travail du personnel soignant est ainsi plus aisé, plus sûr et plus agréable.

Conception compacte et fonctionnelle

Sa conception ingénieuse lui permet de s'adapter à la plupart des toilettes et de franchir les portes sans effort, permettant ainsi aux utilisateurs de rester chez eux en réalisant peu de rénovations, voire aucune.

Confort amélioré

Grâce à la hauteur et l'inclinaison réglables de manière dissociée et aux nombreux accessoires, le confort de l'utilisateur et celui du soignant sont maximisés, ce qui améliore la qualité globale des soins, la dignité et le bien-être.



Alto

Alto, dossier standard, appui-tête standard, dossier souple, appui-jambes standard, porte-seau

Référence

80229602



max
160
kg

max
353
lbs



Matériaux

Cadre : acier époxy
Assise/accoudoirs : polypropylène
Dossier tissu : polyester/velcro
Repose-pieds : polypropylène
Roues : polyamide/TPE, verrouillables, à roulement à billes
Dossier moulé : polypropylène

Nettoyage manuel :

Nettoyer avec un agent non abrasif standard (dont le pH est compris entre 5 et 9). Rincer et sécher.

Désinfecter le produit avec de l'alcool à 70 %. Faire sécher à l'air libre.

Nettoyage en machine :

Nettoyer en machine ou en tunnel. Le nettoyage en machine ou en tunnel doit être effectué conformément à la norme EN/ISO 60 601-2-52.

Poids maximum de l'utilisateur : 160 kg

Résoudre les défis des salles de bains résidentielles

La réalisation des soins d'hygiène dans les salles de bains résidentielles peut s'avérer difficile en raison de l'espace limité et des embrasures de porte étroites. Au vu des multiples modèles de toilettes disponibles, il peut s'avérer difficile de trouver des toilettes suspendues qui s'adaptent correctement aux fauteuils de douche mobiles et inclinables.

Le fauteuil Alto est spécialement conçu pour les soins à domicile grâce à son encombrement compact, idéal pour les espaces exigus. Il comprend une version avec dossier et repose-tête droits, une combinaison unique qui permet de l'installer plus près du mur et garantit un ajustement parfait sur les toilettes suspendues et tous types de toilettes.

Le repose-tête droit permet des réglages latéraux faciles et sans outils, ainsi que des réglages au niveau de la hauteur et de la profondeur pour garantir une expérience confortable à tous les utilisateurs.



Alto avec dossier et repose-tête droits installé sur des toilettes suspendues.

Hygiénique et facile à nettoyer

Outre les contraintes d'espace, d'autres considérations doivent être prises en compte. Pour les établissements et les hôpitaux, le contrôle des infections et l'hygiène sont des facteurs importants. Un fauteuil de douche mobile doit être facile à nettoyer, afin de pouvoir accueillir plusieurs utilisateurs au quotidien.

La conception d'Alto garantit un nettoyage et un entretien faciles, pour un environnement sûr et hygiénique. Alto dispose d'un dossier hygiénique, de surfaces faciles à nettoyer et la majorité des têtes de vis ne sont pas visibles afin de limiter les points d'accumulation de la saleté. Alto est ainsi adapté aux soins à domicile et dans les établissements.

Le dossier moulé est conçu pour soutenir la courbe naturelle de la colonne vertébrale, en favorisant une bonne posture et un bon confort. Il est légèrement flexible dans sa partie inférieure pour s'adapter aux différentes morphologies des utilisateurs. Il est facile à assembler et ne requiert aucun outil. De plus, la hauteur du dossier moulé peut être facilement réglée en le faisant coulisser vers le haut ou vers le bas.



Fauteuil Alto avec dossier moulé, pour un nettoyage rapide et facile.

Accessoires

Le fauteuil Alto est compatible avec une large gamme d'accessoires Swift Mobil-2 pour s'adapter à chaque utilisateur.



Assise fermée à l'arrière

84001337

Un siège fermé à l'arrière et doté d'une découpe hygiénique à l'avant pour un soutien supplémentaire sur les contours de l'assise.

Matériau : polypropylène



Coussin souple avec ouverture ovale

80209067

Coussin en mousse avec housse en tissu hydrofuge. Hauteur de 4 cm.

Matériau : polyéther/plastique enduit



Coussin confort, 4 cm ouverture arrière

80209519

Forme ergonomique et grande souplesse pour un soulagement et un soutien confortables. Conçu avec une découpe à l'avant.

Matériau : polyuréthane



Repose-tête

80209521

Repose-tête réglable et multipositions avec coussin ergonomique. La hauteur, la profondeur, les côtés et l'inclinaison sont réglables. Fourni avec support.

Matériau : coussin : polyuréthane
Fixation : acier inoxydable




Coussin confort, 2 cm ouverture arrière

80209518

Grande souplesse et formes arrondies pour un maximum de confort. Conçu avec une découpe à l'avant.

Matériau : polyuréthane

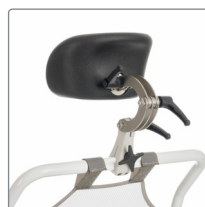

Repose-tête droit

80209533 - En combinaison avec le dossier droit, la chaise peut être placée plus près du mur. Réglable dans plusieurs positions avec coussin ergonomique. Fourni avec support.

Matériau : coussin : polyuréthane

Fixation : acier inoxydable




Coussin confort, 4 cm

Avec petite ouverture de 15 cm : 80209507
Avec grande ouverture de 18 cm : 80209506

Coussins de forme ergonomique, doux et confortables, avec découpes à l'avant. La hauteur est de 4 cm au point le plus bas.

Matériau : polyuréthane

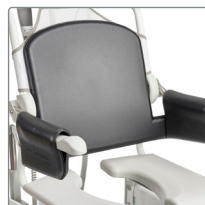

Coussin dossier et accoudoirs

80209455

Dossier souple avec coussins d'accoudoirs intégrés. Le coussin confort offre un appui confortable tout en laissant la zone de préhension de l'accoudoir libre.

Matériau : polyéthylène



Coussin confort, 2 cm

Ouverture de 18 cm : 80209306

Coussin confort souple et moulé avec découpe à l'avant. La hauteur est de 2 cm au point le plus bas.

Matériau : polyuréthane



Kit confort

80209457

Coussin de dossier et accoudoirs avec coussin d'assise confort 4 cm (80209506).

Matériau : polyéthylène



Coussin d'assise plein

80209434

Coussin plein confortable à utiliser pour couvrir l'ouverture hygiénique. Peut être utilisé sous la douche. Hauteur de 2 cm.

Matériau : polyuréthane



Support latéral

80209509

Offre un soutien latéral souple et facilite le positionnement dans la chaise. Largeur réglable.

Matériau : tissu en polyester, velcro et polyéthylène.



Coussin souple avec ouverture standard

80209065

Coussin en mousse avec housse en tissu hydrofuge. Hauteur de 2 cm.

Matériau : polyéther/plastique enduit



Barre transversale

60,5 cm 80303034

66,5 cm 80209452

Un support sécurisé auquel s'accrocher.

Peut également servir de soutien en cas de tension. Se fixe sur les accoudoirs.

Matériau : aluminium, polyéthylène


Accessoires



Coussin de dossier souple

80209448

Apporte chaleur et douceur à l'utilisateur. Utilisé à l'intérieur des accoudoirs, ce qui permet le repli des accoudoirs et le transfert latéral. Matériau : polyéthylène

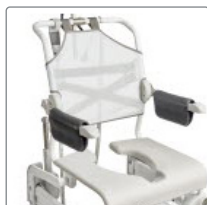

Coussins d'accoudoirs

80209508 - Utilisé pour apporter du confort au niveau des accoudoirs. Fournit une surface chaude et douce pour soutenir les bras, tout en gardant la zone de préhension libre, ce qui permet à l'utilisateur de se lever en toute sécurité. Lot de deux. Matériau : polyéthylène



Accoudoirs pour hémiplégique

80209035


Maintient l'avant-bras grâce à sa forme profilée. Équipé d'un matériau réfléchissant la chaleur à l'extérieur. Compatible avec les accoudoirs gauche et droit. Matériau : polyéthylène



Verrouillage des accoudoirs

80209445


La goupille de blocage peut être utilisée lorsque vous souhaitez verrouiller les accoudoirs en position rabattue ou levée. Matériau : acier inoxydable

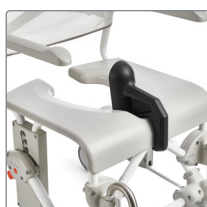

Protection anti-éclaboussures

80209430

Une protection souple contre les éclaboussures d'urine à l'avant. Se fixe à la découpe avant du siège et s'enlève facilement. Matériau : polyuréthane

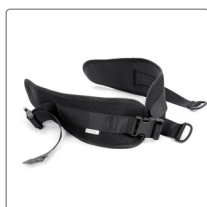

Ceinture de hanche/pectorale rembourrée

80209524 - Ceinture en deux parties pour le positionnement qui peut être utilisée comme ceinture de hanche ou pectorale. Réglable par 3 boucles entre 65 et 130 cm de longueur. Matériau lavable, qui sèche rapidement et offre un soutien ferme lors du positionnement.



Ceinture de hanche

80209440

Facile à ajuster avec une boucle en plastique. S'attache autour des tubes du dossier à l'arrière à l'aide de bandes Velcro. Matériau : polyester



Ceinture pectorale

80209442

Facile à ajuster et à attacher autour des sangles du dossier. Nous recommandons de compléter la ceinture pectorale d'une ceinture de hanche. Matériau : polyester



Bassin avec couvercle et poignée

80209255

Forme intérieure unique qui brise le jet et empêche les éclaboussures. Le couvercle est muni d'une poignée qui se verrouille sur le bassin et empêche le contenu de se renverser. Matériau : polypropylène



Bassin

Bassin sans couvercle 80209254

Couvercle avec poignée 80209256

Forme intérieure unique qui brise le jet et empêche les éclaboussures. Matériau : polypropylène



Supports pour bassin

80209257

Convient pour le bassin Etac 80209255. S'utilise avec les fixations vendues séparément (80209435). Matériau : polypropylène



Verrouillage du bassin

80209049

Maintient le bassin en place lors de l'inclinaison de la chaise de douche. Compatible avec les modèles Swift Mobil Tilt-2. Matériau : polypropylène



Fixation pour supports bassin/seau

80209435

À monter solidement sous le siège pour permettre l'utilisation de supports pour bassin/seau. Montage à l'aide d'un tournevis. Lot de 4. Matériau : polyamide



Attaches pour fixation basse du bassin / seau

80209259

Utilisées pour placer le bassin/seau plus bas sous le siège. Montées avec les supports pour bassin ou seau. Abaissent les supports pour bassin/seau de 6 cm. Matériau : polypropylène

Accessoires



Supports pour seau

80209505

Utilisé comme support pour les seaux ou les bassins hygiéniques avec des bords plus hauts. S'utilise avec les fixations qui sont commandées séparément (80209435).
Matériau : polypropylène



Seau avec poignée et couvercle

80209265

Seau traditionnel qui s'utilise avec les supports pour seau.
Matériau : polypropylène



Repose-pied court


80209520

Un repose-pieds court qui pivote latéralement. Réglable sur 12,5 cm et offrant une longueur de repose-pieds de 24 à 36,5 cm. Le repose-pieds a une forme arrondie. Lot de deux.
Matériaux : acier inoxydable et polypropylène



Repose-pied avec palettes relevables

80209446 - Repose-pied réglable en hauteur et pivotant avec palettes relevables. Pour ceux qui ont besoin d'un angle de pied plus ouvert. Cales talonnières incluses. Lot de deux.
Matériau : acier inoxydable et polypropylène

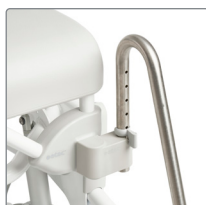

Kit d'élargissement des repose-pieds

80209525 - Adaptateurs pour plus d'espace au niveau des jambes. Augmente la largeur entre repose-jambes de 12 cm. Inclus dans toutes les configurations XL.
Lot de deux. Matériau : polyamide



Repose-jambe et mollet

80209437

Repose-jambe à angle réglable qui peut être utilisé à droite et à gauche. Comprend 4 positions d'angle fixe. Vendu à l'unité.
Matériau : acier inoxydable et plastique ABS



Housse pour repose-jambe et mollet

80209535

Confort accru grâce à une surface douce qui s'adapte facilement en coulisant sur le support. Nettoyage rapide et facile avec un simple chiffon. Matériau : polyester, polyuréthane, nylon, élasthanne



Palette pour repose-jambe et mollet

80209443

Kit avec palette séparée, à monter avec le repose-jambe et mollet.
Matériau : plastique ABS



Repose-jambes angle supérieur

80209531


Éloigne le repose-pieds du cadre. Lot de deux.
Matériaux : acier inoxydable et polyuréthane



Repose-jambes angle inférieur

80209532

Le repose-pieds est plus près du cadre. Lot de deux.
Matériaux : acier inoxydable et polyuréthane

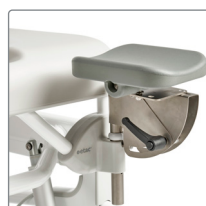

Repose-jambe pour personne amputée

80209510 - Hauteur, longueur et inclinaison réglables. Utilisable à gauche et à droite. Si l'utilisateur est amputé, nous recommandons d'utiliser des dispositifs antibascule.
Matériau : acier inoxydable et polyuréthane



Dossier moulé

80209530 - Soutient la courbe naturelle de la colonne vertébrale, favorisant une bonne posture et le confort. Réglable en hauteur et légèrement flexible dans la partie inférieure. Facile à nettoyer, à entretenir et à monter.
Matériau : polypropylène



Roulette avec blocage directionnel

80209534

Permet de verrouiller la direction de la roue pour faciliter les manœuvres dans les couloirs. Couleur du frein : noir
Matériau : polyamide, polypropylène, TPE, Fe

Voir informations relatives au nettoyage page 10.

Consignes de lavage des accessoires

Coussins d'assise, repose-tête, verrouillage d'accoudoirs, protection anti-éclaboussures, bassin, supports pour bassin, fixations pour supports bassin, attaches pour fixation basse, supports pour seau, seau, repose-pieds, repose-jambes et mollets, repose-jambe pour personne amputée, roulette avec blocage directionnel, assise fermée à l'arrière et dossier moulé



Dossier en tissu, ceinture de hanche/pectorale rembourrée, ceinture de hanche, ceinture pectorale, cale talonnière



Coussins confort, coussin plein confort, coussin de dossier souple, coussins d'accoudoirs, accoudoirs pour hémiplégique, barre transversale, repose-jambes et repose-mollets avec housse



Explication des symboles de nettoyage



Lavage en machine – température max. 60 °C/140 °F



Nettoyage manuel : nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant avec un pH de 6 à 9 ou une solution désinfectante à 70 %.



Nettoyage en machine : le produit peut être nettoyé dans un laveur-désinfecteur à 85 °C pendant 3 minutes.



Dimensions

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur d'assise	Hauteur du dossier	Profondeur d'assise
Alto	972 mm	600 mm	500 / 930 mm	540 mm (590 mm*)	465 mm
Modèle	Hauteur du repose-pied	Largeur d'assise	Hauteur de l'accoudoir	Distance entre les accoudoirs	Dimensions au-dessus des toilettes
Alto	340 / 465 mm	500 mm	220/250/280 mm	420/480/540 mm	A = min. 105 mm B = 190 mm C = min. 600 mm (510 mm)*
Modèle	Hauteur	Roulettes	Espace libre au-dessus des toilettes	Espace libre au-dessus des toilettes	Angle d'inclinaison
Alto	1 040 - 1 470 mm (1 085-1 515 mm*)	125 mm	406 mm (430 mm)**	445 mm	-5° à 30°
Modèle	Diamètre de rotation	Poids max. de l'utilisateur	Poids		
Alto	ø 1 005 cm (ø 995 mm*)	160 kg	40 kg		

*S'applique aux modèles 80229607, 80229608 **À l'intérieur des vérins



Découvrez l'usage prévu de nos produits et notre actualité
en consultant www.etac.com



Promefa
Avenue de Morges 33
1027 Lonay
Suisse
Tel : +41 44 872 97 79
promefa@promefa.ch

