



Etac Alto

Sedia Doccia WC

Alzare il livello qualitativo dell'assistenza

Alto è un sistema di seduta per funzioni igieniche, compatto, basculante e regolabile in altezza, che può essere utilizzato per la doccia, la toilette e il trasporto. È stato progettato tenendo conto delle esigenze dei caregiver e degli utenti e si adatta perfettamente ad essere utilizzato in diversi contesti: dall'assistenza domiciliare all'uso in ospedale o in strutture assistenziali.



Aprire la strada alla dignità e all'indipendenza

Lo spazio limitato del bagno rappresenta una difficoltà, che spesso porta a scegliere ausili basati sui limiti anziché sulle esigenze individuali, con conseguenti compromessi. I caregiver devono affrontare compiti fisicamente impegnativi, trascorrendo molto tempo in posizioni scorrette, che possono causare lesioni.

Realizzato per spazi ridotti, Alto offre un facile accesso che semplifica le attività di assistenza ed elimina costose ristrutturazioni. I caregiver possono godere di una riduzione dello stress e del rischio di lesioni, traducendosi in un'assistenza migliore e più dignitosa.

Scopri le caratteristiche

Sedia doccia WC con eccellente manovrabilità e accesso a 360 gradi, progettata specificamente per semplificare le attività di assistenza personale per il caregiver, garantendo al contempo il comfort dell'utente.

Poggiatesta multiregolabile

Progettato per offrire il massimo comfort e flessibilità. Regolabile per adattarsi a una serie di esigenze degli utenti.

Larghezza regolabile

I braccioli e i supporti per gambe regolabili offrono spazio aggiuntivo.

Comando manuale intuitivo

Pulsantiera di facile utilizzo con sei pulsanti e indicatore del livello di batteria.

Seduta con apertura posteriore

Consente un facile accesso.

Regolazione dell'altezza e del basculamento

Facilmente regolabile nella posizione preferita.

Materiale di facile pulizia

IP46, non corrosivo, e senza accumulo di residui.

Ingombro ridotto

Facile da manovrare attraverso porte di misure standard.

Design lineare

Lati aperti per un facile accesso.

Batteria potente

La potente batteria dura per 70-100 cicli di utilizzo.

Eccellente manovrabilità

Per facilitare le manovre in spazi ridotti.



Alto

Alto è una sedia doccia WC, regolabile in altezza e basculamento. Offre un'eccezionale manovrabilità e un accesso ergonomico a 360 gradi, riducendo il rischio di lesioni per gli operatori.

Accesso ergonomico per il caregiver

Assistenza nell'intera routine igienica senza eseguire compiti fisicamente impegnativi, senza sovraccaricarsi o assumere posture scomode che possono causare infortuni sul lavoro.

Facile da manovrare e utilizzare


Consente di essere manovrata con una sola mano e questo facilita e rende più sicuro il lavoro del caregiver.

Design compatto e funzionale

Grazie al suo design accattivante, si adatta alla maggior parte dei servizi igienici e passa senza problemi attraverso le porte, consentendo agli utenti di continuare a vivere nelle loro case senza bisogno di ristrutturazioni.

Maggiore comfort e comodità

La possibilità di regolare l'altezza e il basculamento, oltre ai vari accessori per aumentare il comfort dell'utilizzatore, rendono il lavoro dei caregivers più efficace e sicuro.

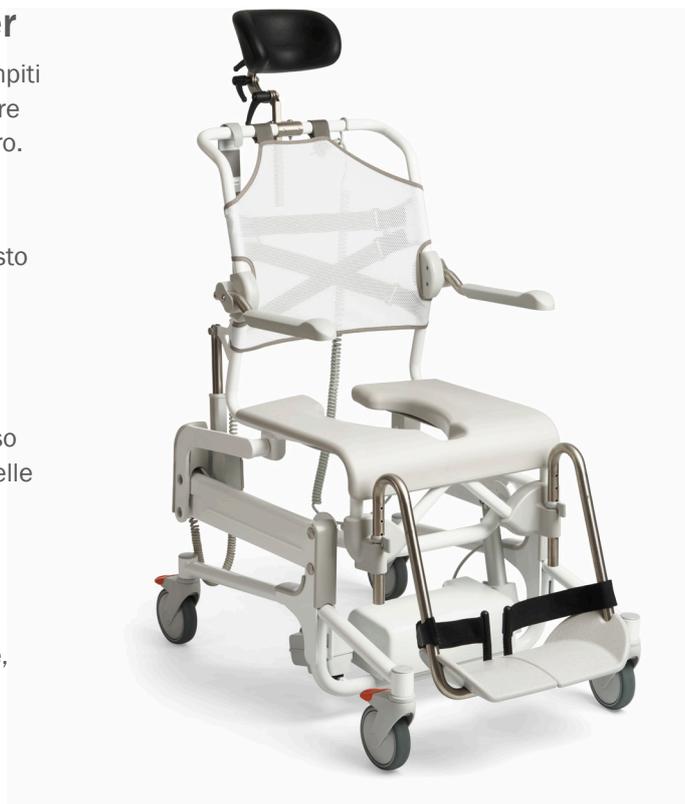

La garanzia è di 5 anni e sulla batteria di 1 anno.

Alto

Alto CH, schienale std, supporto testa std, supporto schiena morbido, supporto gambe std, supporto padella

Articolo n.

80229602



max 160 kg max 353 lbs



Materiali

Telaio: acciaio verniciato a polvere
Supporto sedile/braccioli: polipropilene
Schienale morbido: poliestere/velcro
Supporto piedi: polipropilene

Ruote: poliammide/TPE, bloccabili, con cuscinetti a sfera
Schienale lavabile: polipropilene

Pulizia manuale:

Pulire il prodotto con normali detersivi non abrasivi (pH compreso tra 5 e 9). Sciacquare e asciugare

Disinfettare il prodotto con un panno imbevuto di alcol al 70%. Lasciare asciugare all'aria.

Pulizia a macchina:
Lavare il prodotto a macchina o in tunnel di lavaggio. La pulizia a macchina o in tunnel di lavaggio deve essere effettuata in conformità alla norma EN/ISO 60601-2-52

Peso: massimo dell'utente: 160 kg.

Risolvere le difficoltà dei bagni domestici

Lavorare nei bagni domestici può essere difficile a causa di spazio limitato e porte strette. Con le diverse tipologie di bagni privati esistenti, può essere difficile trovare opzioni a parete che funzionino bene con le sedie doccia WC basculanti.

Alto è stato progettato appositamente per gli ambienti di assistenza domiciliare, offrendo un ingombro ridotto ideale per gli spazi più piccoli. Include una versione con schienale verticale e poggiatesta, una combinazione unica che consente di avvicinare sedia doccia WC alla parete e di adattarla perfettamente ai wc a parete e a molti bagni standard.

Poggiatesta consente una facile regolazione laterale senza l'ausilio di attrezzi, nonché la regolazione dell'altezza e della profondità per garantire un'esperienza confortevole a tutti gli utenti.



Alto con schienale verticale e supporto verticale per la testa su toilette a parete.

Igienico e facile da pulire

Oltre ai limiti di spazio, ci sono altre considerazioni da tenere presenti. Per istituti e ospedali, il controllo delle infezioni e l'igiene sono fattori importanti. Una sedia doccia WC deve essere facile da pulire, in modo da poter essere utilizzata da più persone al giorno.

Il design di Alto garantisce facilità di pulizia e manutenzione, per un ambiente sicuro e igienico. Offre una versione con schienale igienico, superfici facili da pulire e poche vite visibili dove si può accumulare lo sporco. Questo rende Alto adatto sia all'assistenza domiciliare che all'interno di istituti.

Lo schienale lavabile è progettato per sostenere la curva naturale della colonna vertebrale, favorendo una buona postura e comfort. È leggermente flessibile nella parte inferiore per adattarsi alle diverse forme degli utenti. È facile da montare e non richiede l'uso di attrezzi. Inoltre, l'altezza dello schienale lavabile può essere facilmente regolata facendo scorrere il supporto verso l'alto o verso il basso del telaio.



Alto con schienale lavabile, rende la pulizia un compito facile e veloce.

Accessori

Alto è compatibile con un'ampia gamma di accessori Swift Mobil-2, consentendo una personalizzazione facile.



Piano di seduta con foro centrale

84001337

Piano di seduta con foro centrale per offrire maggiore stabilità

Materiale: Polipropilene



Cuscino con apertura ovale

80209067

Cuscino in espanso con fodera impermeabile. Altezza 4 cm.

Materiale: Polietere/rivestimento in plastica.



Sedile Soft Comfort, 4 cm apertura posteriore

80209519

Morbida seduta ergonomica con incavo anteriore che riduce la pressione di contatto aumentando il comfort.

Materiale: Poliuretano



Poggiatesta

80209521

Poggiatesta multifunzione con imbottitura anatomica regolabile lateralmente, in altezza, profondità ed inclinazione.

Materiali: Imbottitura: Poliuretano

Staffa di supporto: Acciaio.



Sedile Soft Comfort, 2 cm apertura posteriore

80209518

Morbida seduta ergonomica con incavo anteriore che riduce la pressione di contatto aumentando il comfort.

Materiale: Poliuretano



Poggiatesta con supporto verticale

80209533

Utilizzato in combinazione con lo schienale verticale permette di avvicinare la sedia doccia al muro. Anatomico e multiregolabile, completo di staffa. Materiale: Cuscino: Poliuretano,

Rinforzo: Acciaio inox.



Sedile Soft Comfort, 4 cm

Apertura centrale 15 cm: 80209507

Apertura centrale 18 cm: 80209506

Morbida seduta ergonomica con incavo anteriore che riduce la pressione di contatto aumentando il comfort.

Materiale: Poliuretano



Rivestimento comfort

80209455

Schienale morbido con cuscini di supporto per braccia integrati. L'imbottitura comfort offre un sostegno morbido, mentre la superficie di presa sul bracciolo rimane libera. Materiale: Polietilene.



Sedile Soft Comfort, 2 cm

Apertura centrale 18 cm: 80209306

Morbida seduta ergonomica con incavo anteriore che riduce la pressione di contatto aumentando il comfort.

Materiale: Poliuretano



Imbottitura Comfort

80209457

Schienale morbido con imbottiture braccioli.

Una superficie d'appoggio morbida e confortevole che permette comunque l'appoggio durante i trasferimenti.

Materiale: Polietilene.



Sedile senza foro

80209434

Sedile planare per coprire l'apertura da utilizzare nella doccia.

Altezza imbottitura 2 cm.

Materiale: Poliuretano



Supporti laterali tronco

80209509

Supporti laterali imbottiti che migliorano la postura e aumentano il comfort. Regolabili in larghezza.

Materiali: Tessuto di poliestere, Velcro, Polietilene.



Cuscino con apertura standard

80209065

Cuscino in espanso con fodera impermeabile. Altezza 2 cm.

Materiale: Polietere/rivestimento in plastica



Barra di appoggio anteriore

60.5 cm 80303034 / 66.5 cm 80209452

Può essere utilizzata come punto d'appoggio anteriore e/o per aumentare la sensazione di sicurezza dell'utilizzatore. Si fissa facilmente ai braccioli.

Materiali: Alluminio, polietilene.

Accessori



Imbottitura schienale Soft

80209448

Offre una piacevole sensazione di comfort e permette di ribaltare i braccioli per facilitare i trasferimenti laterali.

Materiale: Polietilene.



Imbottitura braccioli

80209508

Una superficie d'appoggio morbida e confortevole che permette comunque l'appoggio durante i trasferimenti. Venduti a coppia.

Materiale: Polietilene.



Braccioli per emiplegici

80209035

Bracciolo sagomato per posizionare l'arto plegico. Utilizzabile su entrambi i braccioli (destra/sinistra).

Materiale: Polietilene.



Sistema di bloccaggio per bracciolo

80209445

Sistema di bloccaggio che permette di fissare il bracciolo in posizione alzata o abbassata.

Materiale: Acciaio.



Paraspruzzi

80209430

Il paraspruzzi viene applicato nella parte anteriore della seduta e può essere facilmente rimosso.

Materiale: Poliuretano.



Cintura tronco/bacino

80209524

Cintura imbottita ad asciugatura rapida per il controllo posturale. Può essere usata sia come cintura per il tronco che come cintura per il bacino. Lunghezza regolabile da 65 a 130 cm.



Cinghia pelvica

80209440

Offre un buon posizionamento posturale del bacino. Facile da regolare attraverso la fibbia centrale. Si fissa intorno ai tubi dello schienale con appositi fissaggi in velcro.

Materiale: Poliestere.



Cintura per il tronco

80209442

Offre un buon supporto anteriore del tronco. Viene fissata nella parte posteriore dello schienale e se ne raccomanda l'utilizzo associato ad una cinghia pelvica.

Materiale: Poliestere.



Padella con coperchio e maniglia

80209255

E' dotata di una maniglia posteriore e di una superiore che automaticamente blocca il coperchio quando viene sollevata. Gli attacchi per la padella non sono inclusi.

Materiale: Polipropilene.



Padella

Padella senza coperchio 80209254

Coperchio con maniglia 80209256

Materiale: Polipropilene.



Attacchi per padella

80209257

Adatti per qualsiasi tipo di padella con il bordo sottile. Vengono fissati sotto al sedile utilizzando gli appositi alloggiamenti.

Materiale: Polipropilene.



Sistema di bloccaggio per padella

80209049

Mantiene la padella in posizione quando la Swift è basculata. Utilizzabile sui vari modelli Swift Mobil Tilt-2.

Materiale: Polipropilene.



Set di fissaggio per attacco padella

80209435

Da utilizzare per fissare sotto la seduta gli agganci per padella.

Materiale: Poliammide.



Attacchi per montaggio ribassato

80209259

Permettono di abbassare gli attacchi per padella/secchio di 6 cm.

Materiale: Polipropilene.

Accessori



Attacchi per secchio

80209258

Adatti per qualsiasi tipo di secchio. Vengono fissati sotto al sedile utilizzando gli appositi alloggiamenti.

Materiale: Polipropilene.



Pedana poggiapiedi elevabile

80209443

Kit con pedana poggiapiedi da utilizzare con il poggiatesta regolabile in altezza.

Materiale: plastica ABS.



Secchio con maniglia e coperchio

80209265

Capiente secchio con maniglia e coperchio. Gli attacchi non sono inclusi e vanno ordinati separatamente.

Materiale: Polipropilene.



Supporto gambe angolato grande

80209531

Allontana il poggiapiedi dal telaio. Venduti in coppia.

Materiale: Acciaio inox e poliuretano.



Pedane ridotte

80209520

Pedane ridotte ribaltabili e regolabili da 24 a 36.5 cm. Poggiapiedi ergonomico.

Vendute al paio.

Materiali: acciaio e polipropilene.



Supporto gambe angolato ridotto

80209532

Avvicina il poggiapiedi al telaio. Venduti in coppia.

Materiale: Acciaio inox e poliuretano.



Pedane con poggiapiedi ribaltabili

80209446

Pedane regolabili in altezza ed estraibili con poggiapiedi ribaltabili. Complete di cinturini fermatallonni. Vendute al paio.

Materiale: Acciaio e polipropilene.



Poggiagambe per amputati

80209510

Regolabile in altezza, lunghezza ed inclinazione. utilizzabile a destra o a sinistra. Con pazienti amputati si consiglia l'utilizzo del dispositivo di antiribaltamento.

Materiale: acciaio and poliuretano.



Poggiagambe regolabile in altezza

80209437

Permette di variare l'inclinazione dell'arto inferiore in 4 posizioni predefinite. Venduto singolarmente, utilizzabile a destra o a sinistra. Materiale: Acciaio e plastica ABS.



Schienale lavabile

80209530

Supporta la naturale curvatura della colonna vertebrale, favorendo la postura e il comfort. Regolabile in altezza e flessibile nella parte inferiore. Facile da pulire e montare.

Materiale : polipropilene.



Imbottitura per poggia gambe

80209535

Maggiore comfort grazie a una imbottitura che si adatta facilmente al supporto. Facile e veloce da pulire con una semplice passata. Materiale: Poliesteri, poliuretano, nylon, Spandex.



Blocco direzione

80209534

Offre la possibilità di bloccare le ruote per facilitare la manovra.

Colore del freno : nero

Materiale : poliammide, polipropilene, TPE, Fe.

Vedere le istruzioni di lavaggio a pagina 10.

Istruzioni per il lavaggio degli accessori

Sedute Soft Comfort e rivestimento seduta, supporto per la testa, supporto verticale per la testa, blocco per bracciolo, paraspruzzi, padella, supporto padella, supporto di attacco, attacco per il montaggio basso, staffe secchio, secchio, poggiapiedi, supporto per gambe e polpacci, supporto per gambe amputate, blocco di direzione delle ruote, seduta con lato posteriore chiuso e schienale lavabile



Schienale, cintura per fianchi e torace imbottita, cintura per fianchi, cintura per torace e cinturino per talloni



Cuscini morbidi, rivestimento comfort, schienale morbido, cuscinetto per braccioli, supporto per emiplegia, traversa e supporto per gambe e polpacci



Spiegazione dei simboli per il lavaggio



Lavaggio in lavatrice - temperatura massima 60 °C



Pulizia manuale: Pulire il prodotto con un detergente privo di solventi con un livello di pH compreso tra 6 e 9 o con una soluzione disinfettante al 70%.




pulizia in autoclave: Il prodotto può essere pulito in autoclave a una temperatura massima di 85 °C per 3 minuti.




Misure



Modello	Lunghezza	Larghezza	Altezza seduta	Altezza schienale	Profondità seduta
Alto	972 mm	600 mm	500 / 930 mm	540 mm (590 mm*)	465 mm

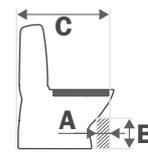

Modello	Altezza poggiapiedi	Larghezza seduta	Altezza bracciolo	Da bracciolo a bracciolo	Dimensione del WC
Alto	340 / 465 mm	500 mm	220/250/280 mm	420/480/540 mm	A= Min 105 mm B = 190 mm C = Min 600 mm (510 mm)*

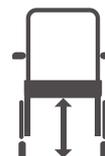

Modello	Altezza	Ruote	Spazio sopra il WC	Spazio sopra il WC	Angolo di inclinazione
Alto	1040-1470 mm (1085-1515mm*)	125 mm	430 mm (406 mm)**	445 mm	-5° - 30°



Modello	Raggio di movimentazione	Peso massimo dell'utente	Peso		
Alto	ø 1005 mm (ø 995 mm*)	160 kg	40 kg		

*Si applica a 8022 9607, 8022 9608 **Sul lato interno dell'attuatore



Per informazioni sull'uso corretto dei prodotti e gli ultimi aggiornamenti,
visita il sito www.etac.com



Promefa
Avenue de Morges 33
1027 Lonay
Suisse
Tel : +41 44 872 97 79
promefa@promefa.ch

