

HABA Rollstuhltisch



HABA Rollstuhltisch

Universeller Rollstuhl-Therapietisch

Die einfache und gleichzeitig technisch fundierten Befestigungstechnik des HABA-Rollstuhltisches ist eine universelle Lösung für alle gängigen Rollstuhl-Größen und schafft somit eine praktische Alltagshilfe.


Leistungsmerkmale:


- aus unzerbrechlichem Polycarbonat gefertigt
- exzentrisch verstellbare Halter ermöglichen auch an kurzen Armlehnen einen sicheren Halt
- eine Standard-Grösse
- bis etwa einer Sitzbreite von 50 cm einsetzbar


HABA Rollstuhltisch
Art.-Nr. HABA2-Poly


max. Belastbarkeit	10 kg
B x T	630 x 530 mm
B innen	420 mm
Gewicht	2,7 kg

Montageanleitung

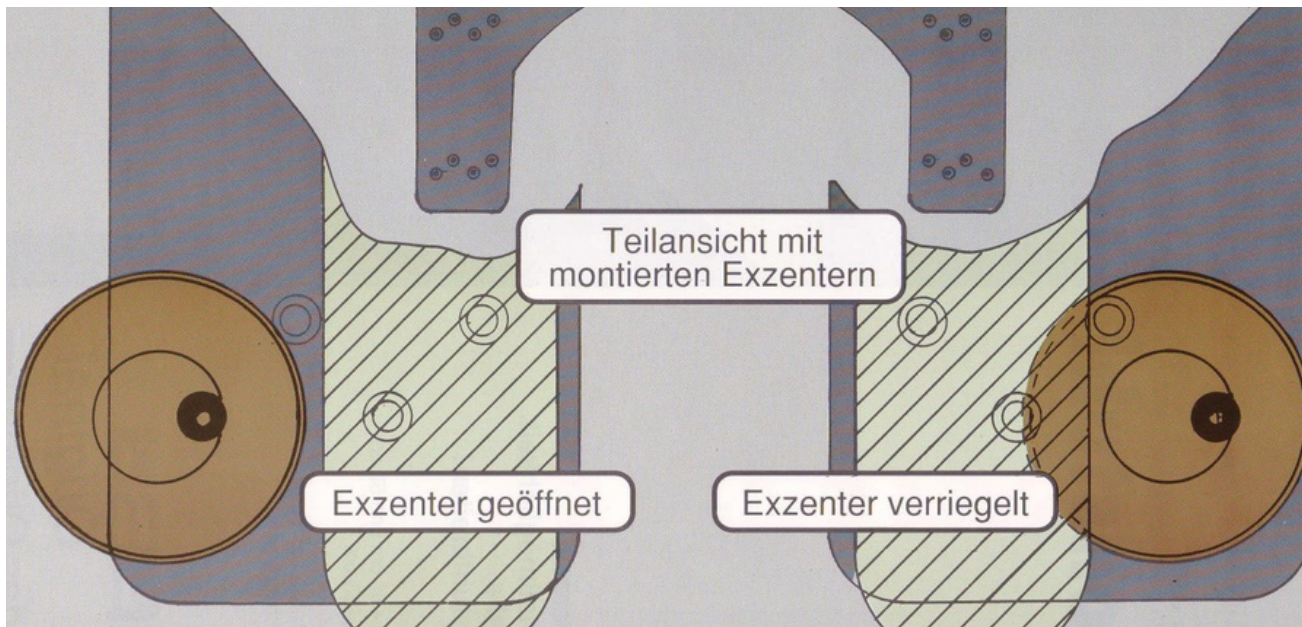


 Bevor Sie mit der Montage und Inbetriebnahme beginnen, lesen Sie bitte diese Benutzerinformation genau durch und überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

	1x Polyacryl-Tischplatte	①
	4x Exzenter Aluminium	③
	4x Senkkopfschraube M6x50 Sechskant I4	②
	4x Federscheibe M8/24 schwarz	④
	4x Unterlagscheibe M6/18	⑤
	4x Sicherungsmutter M6	⑥


 **Montagetipp:**
Positionieren Sie die mitgelieferten Exzenter ausserhalb der Armlehnen, so dass im geöffneten Zustand ca. 5mm Abstand zu den Armlehnen gegeben bleiben.

Sechskantschlüssel I4 *

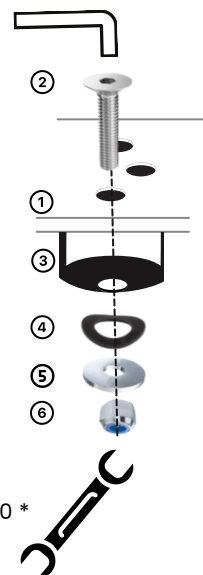

Ringgabelschlüssel No. 10 *

*Nicht im Lieferumfang enthalten

 Eine Haftung entfällt insbesondere in folgenden Fällen vollständig: Fremdeingriff, ungeeignete oder unsachgemässe Verwendung, Zweckentfremdung, fehlerhafte Montage, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung.