

ROHO

Wenn Sitzen zum Alltag wird



Die zwei Hauptprobleme

1. Dekubitus

Punktuellem, langfristig wirkender Druck sowie Reibung & Scherkräfte können das Gefäss-System verformen. Ein Abschneiden der Durchblutung ist die Folge. Das Gewebe wird nur noch gering oder gar nicht mehr mit Sauerstoff & Nährstoffen versorgt. Auch der Abtransport von Schlackstoffen kann beeinträchtigt werden. Die Folge davon ist ein Absterben des Gewebes, was bis auf den Knochen fortschreiten kann. Solche Wunden können zu einigen Monaten Spitalaufenthalt sowie Kosten von mehreren CHF 10'000.-- führen.

Wie können WIR dem entgegenwirken?


Verhindern einer Verformung des Gefäss-Systems durch:

- Vermeidung von punktuellm Druck durch *Druckumverteilung*
- Verhinderung von Reibung und Scherkräften durch Verwenden von Materialien, welche sich der *Körperkontur anpassen* (Vorsicht bei Überzügen!)

2. Fehlende Funktion & Stabilität

Eine „Fehlhaltung“ kann sehr schnell eine Verformung des Gefäss-Systems verursachen. Andererseits kann sie die Funktion & Interaktion des Rollstuhlfahrers mit seinem Umfeld einschränken. Auch die inneren Organe können in der Funktion beeinträchtigt werden. (Zur Beurteilung der Sitzhaltung unbedingt den ganzen Körper sowie Krankheitsbild, Umgebung, aktuelle Situation, etc. des Patienten beachten).

ROHO: Eine Lösung für die zwei Hauptprobleme

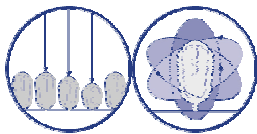

Druckentlastung, Hautschutz:

Druckumverteilung durch Einsinken & Ummantelung des Körpers, Luftzirkulation & Oberflächenvergrößerung. Verhinderung von Reibung & Scherkräften dank 4-Zellen-Freiheit.



Positionierung/Stabilisierung:

Individuelle Anpassung an jede Körperform jederzeit & ohne Transfer möglich. Mehr Stabilität dank 4-Kammer-Prinzip (Quadro-Kissen).



Einstellung/Wartung:

Einfach, schnell (ohne Transfer), jederzeit individuell, tägliche Kontrolle, mit MERLIN automatisch



Materialeigenschaften/Service:

Leichte Reinigung, geringes Gewicht, temperaturunabhängig, schneller Reparaturservice, langjährige Lebensdauer, schwer entflammbar, desinfizier- & autoklavierbar, 3 J. Garantie (SELECT-Kissen).

STUDIEN, INFOS, etc. unter
www.promefa.ch