

ROHO-Schulung

„Decubitus und dynamisches Sitzen“



Das Problem

Krankheitsbild

- Ungleiches Druck, Bewegungsarmut, schlechter Allgemeinzustand, schlechte Ernährung, etc.
 - ⇒ Schädigung der Haut und der darunter liegenden Gewebe durch ungenügende Sauerstoffversorgung über längere Zeit: Wundliegen = **Decubitus** (verschiedene Grade von Rötungen bis hin zu Geschwüren, Ausmass teilweise nicht sichtbar!).
- Funktionelle Asymmetrien im Sitzen
 - ⇒ Sich verschlechternde, unkomfortablere Sitzhaltungen.

Versicherungen

Prävention wird kaum bezahlt! Aber frühzeitige Massnahmen sind unsere Verantwortung.

Patient

Unwissen, will kein Geld ausgeben nur wegen kleinen Rötungen oder leichten Schmerzen bis dann der Schaden zu gross ist.

Heim und Spitäler

Oft „Begleiterscheinung“, Zeitdruck, wird der Pflege überlassen ohne die entsprechenden Schulungen und nötigen Hilfsmittel. Solche Schäden können, nebst Immobilität, Schmerzen etc. Kosten von bis zu CHF 100'000.00 für eine Person verursachen.

Wie hilft ROHO im Bereich der Druckproblematik und Asymmetrien?

- Druckentlastung (physikalisch nur begrenzt möglich) durch Druckverteilung
- Optimale und dauerhafte Druckverteilung
- Minimalste Reibungen
- Minimalste Scherkräfte
- Belüftung, Flüssigkeitsabtransport
- Stufenlose Positionierung und Stabilisation möglich

Richtiges Anpassen eines ROHO Kissens

- Kissen etwas **überpumpen**.
- Hand zwischen tiefsten Knochen des Patienten und ROHO Kissen.
- Person einsinken lassen, bis **handbreit** zur festen Unterlage, d.h. Patient muss im Kissen einsinken und darin „schwimmen“, der tiefste Knochen darf aber niemals die harte Unterlage berühren.
- Regelmässige Kontrollen.

Warum Luft als „Material“?

- Luft ist leicht (im Zeitalter der teuren Leichtrollstühle...)
- Rohstoff Luft ist überall und gratis verfügbar
- Keine Verschmutzung beim Entweichen
- Luft lässt sich komprimieren, Stossdämpferwirkung
- Luft isoliert und zirkuliert über die Jahre und bei allen Temperaturen gleichmässig

Funktionen und Vorteile des ROHO-Kissens oder der ROHO-Matratze

- 4 „Freiheiten“ jeder Zelle, dadurch passen sich die Zellen an beim Bewegen und nicht das Gewebe!
- Komplette, dauernde und selbstständige Zirkulation der Luft über die ganze Sitzfläche.
- Dies ergibt eine dauernde, bestmögliche Druckverteilung.
- Schläge durch Erschütterungen beim Fahren werden amortisiert.
- Allfällige Flüssigkeiten bleiben nicht auf dem Niveau der Haut liegen, sondern können abfließen.
- Schmerzlinderung durch optimale Druckverteilung und Gefühl von weich.
- Isolierung von unten, kein Gefühl der Kälte (spez. Blase und Füsse).
- Spez. Modelle für stufenlose Positionierung-Stabilisierung

Unterhalt und Reinigung

- Waschbar mit allen hautverträglichen Produkten. Reinigen mit Dusche über dem Badewannenrand.
- Reparaturen möglich.

Nachteile

- Luftverlust möglich, effizienter Reparatur-Service nötig.
- Korrektes Einstellen ein Muss!
- Gefühl von Unstabilität bei Standardkissen (siehe aber: QUADTRO SELECT, CONTOUR SELECT (neu!) ENHANCER, nexus-SPIRIT!).

Konkurrenz und Stellung im Markt

- Bekannt als hocheffizientes Antidecubitusprodukt.
- Direkte Konkurrenz v.a. Schaumstoff (Preis!) und Gel.
- Neuere Produkte drängen auf Markt: „wie ROHO aber ohne die Nachteile von ROHO“. Alle diese Produkte haben aber nicht die gleich optimale Druckverteilung (und das ist das Wichtigste!) im höchsten Effizienzbereich.

Unsere Prioritäten

- Schulung, Schulung, Schulung ! Damit der Kunde mehr über die ganze Problematik weiss, als nur „ja es ist komfortabel“ oder „billig“.
- Fördern der Spezialkissen wie QUADTRO SELCET™, CONTOUR SELECT™ (neu!) ENHANCER™, nexus-SPIRIT™. Siehe neue Preisliste!
- Top-Service, hohe Lieferbereitschaft und effizienter Reparaturservice.