



android




Install the Rollz app
De Rollz-app installeren
Installieren Sie die Rollz-App
Installer l'application Rollz



Rollz

-
- EN** - Open the app and accept the requested permissions.
- NL** - Open de app en accepteer de gevraagde toestemmingen.
- DE** - Öffnen Sie die App und akzeptieren Sie die angeforderten Berechtigungen.
- FR** - Ouvrez l'application et acceptez les autorisations demandées.

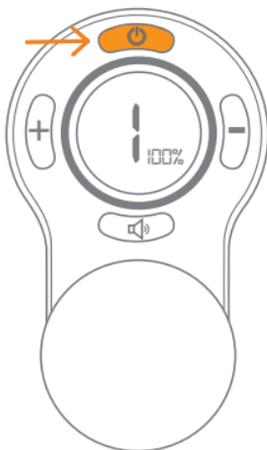

EN - Turn on the joystick of the Rollz Motion Electric.

NL - Zet de joystick van de Rollz Motion Electric aan.

DE - Schalten Sie den Joystick des Rollz Motion Electric ein.

FR - Mettez en marche le joystick du Rollz Motion Electric.




EN - Select 'Rollz Electric' and tap 'Connect'.

NL - Selecteer 'Rollz Electric' en tik op 'Verbinden'.

DE - Wählen Sie "Rollz Electric" und tippen Sie auf "Verbinden".

FR - Sélectionnez "Rollz Electric" et appuyez sur "Connecter".

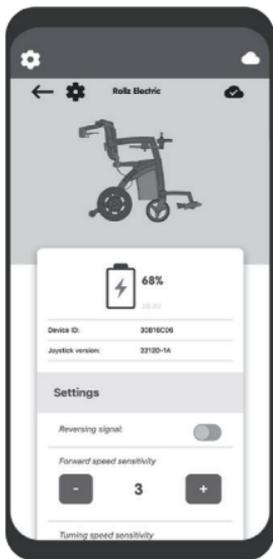

EN - Once connected (a few seconds), adjust settings to your preferences. Tap "Save" to apply changes.

NL - Zodra je verbinding hebt gemaakt (enkele seconden), kunt u de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren. Tik op "Opslaan" om de wijzigingen toe te passen

DE - Sobald die Verbindung hergestellt ist (einige Sekunden), passen Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen an. Tippen Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu übernehmen.

FR - Une fois connecté (quelques secondes), réglez les paramètres de vos préférences. Appuyez sur "Enregistrer" pour appliquer les modifications.




EN - Turn the reversing signal on or off to enable or disable the beeping sound when driving backwards.

NL - Schakel het achteruitrijsignaal in of uit om het geluidssignaal bij achteruitrijden in of uit te schakelen.

DE - Schalten Sie das Rückfahrtsignal ein oder aus, um den Signalton beim Rückwärtsfahren zu aktivieren oder zu deaktivieren.

FR - Activez ou désactivez le signal de marche arrière pour activer ou désactiver le bip sonore lors de la conduite en marche arrière.

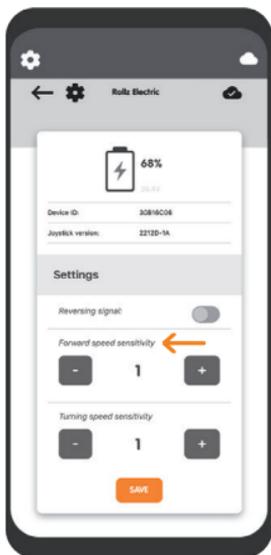

EN - Forward speed sensitivity: a lower setting means a slower response and longer time to reach maximum speed.

NL - Snelheidsgevoeligheid vooruit: een lagere instelling betekent een langzamere reactie en een langere tijd om de maximale snelheid te bereiken.

DE - Empfindlichkeit der Vorwärtsgeschwindigkeit: Eine niedrigere Einstellung bedeutet eine langsamere Reaktion und eine längere Zeit bis zum Erreichen der Höchstgeschwindigkeit.

FR - Sensibilité de la vitesse avant: un réglage inférieur signifie une réponse plus lente et un temps plus long pour atteindre la vitesse maximale.



EN - Turning speed sensitivity: a higher setting results in more responsive control and faster turns.

NL - Intensiteit draaisnelheid: een hogere instelling resulteert in een responsievere controle en snellere bochten.

DE - Empfindlichkeit der Drehgeschwindigkeit: Eine höhere Einstellung führt zu einer reaktionsschnelleren Steuerung und schnelleren Drehungen.

FR - Sensibilité de la vitesse de rotation: un réglage plus élevé permet un contrôle plus réactif et des virages plus rapides.