





MANUEL D'UTILISATION

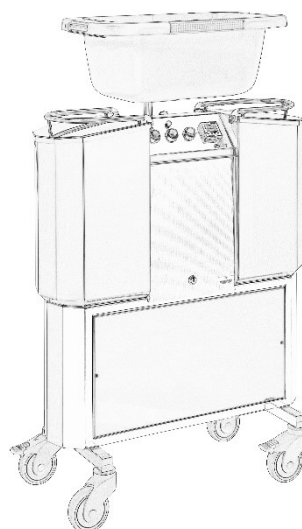

L'appareil ne doit pas être mis en service avant d'avoir lu et assimilé ce manuel

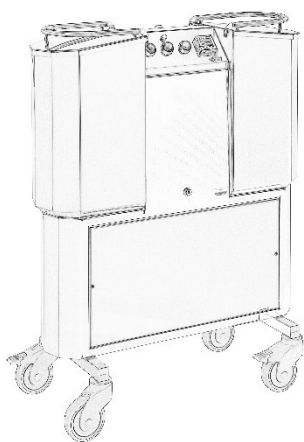

Modèle C.H. - EVOLUTION

Ind	Date	Rédacteur	Modifications
0	27/11/2024	N.Sauvage	Rédaction initiale
A	09/01/2024	N.Sauvage	Retouche globale



Utilisation prévue :

Apporter, chauffer et récupérer l'eau sur un lit, soit douche des personnes au lit.

Consignes de sécurité

- L'appareil doit être branché à une prise de courant adaptée.
- Il est interdit de brancher et débrancher l'appareil les mains mouillées.
- L'ouverture à la zone technique n'est autorisée qu'au personnel qualifié (service technique).
- Tenir compte des particularités de chaque endroit de travail et de la présence de personnes et d'enfants.
- Pour le nettoyage, il est interdit de verser de l'eau ou de vaporiser une solution sur l'appareil.
- Il faut débrancher l'appareil pendant les opérations de nettoyage.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le câble.
- Contrôler régulièrement l'état du câble d'alimentation.
- Avec la douchette, il est interdit d'effectuer des projections en direction d'éléments électriques (prise, interrupteur ou tout autre matériel à proximité).
- Signaler au service technique toute anomalie et arrêter l'utilisation de l'appareil.
- La remise en état et les réparations doivent être exclusivement réalisées par les services de maintenance compétents.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation erronée de l'appareil.
- L'appareil doit être entreposé dans un local sec et un environnement non corrosif.
- L'appareil doit être déplacé en le faisant rouler dans le sens de la longueur.
- Fixation du tuyau de douche-douchette.
- Bien s'assurer de la fixation.
- Si vous décelez une fuite, arrêter immédiatement l'appareil et le déconnecter.
- Contrôler régulièrement le tuyau de douche-douchette, si celui-ci est dégradé, le changer.

Pour toute anomalie constatée, en informer immédiatement le service technique.

La compatibilité électromagnétique est conforme à la norme N° 60601-1-2. Si problème identifié par rapport au fonctionnement des appareils sur le site :



Ce symbole apposé sur l'appareil indique que celui-ci ne peut pas être traité comme déchet ménager

Mettre hors circuit l'appareil de douche au lit

LA DOUCHE MOBILE MODELE C.H. EVOLUTION A UNE AUTONOMIE SUFFISANTE POUR PERMETTRE A TOUTES LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE, QUELLES QU'ELLES SOIENT, DE SE DOUCHER.

Le matériel est en inox approprié à l'usage sanitaire. Il comprend deux réservoirs, un pour l'eau propre destinée à la douche et l'autre pour recueillir les eaux usées. Un coffre intérieur où sont logées les pompes et un coffre central qui reçoit les éléments de sécurité.

TABLEAU DE BORD

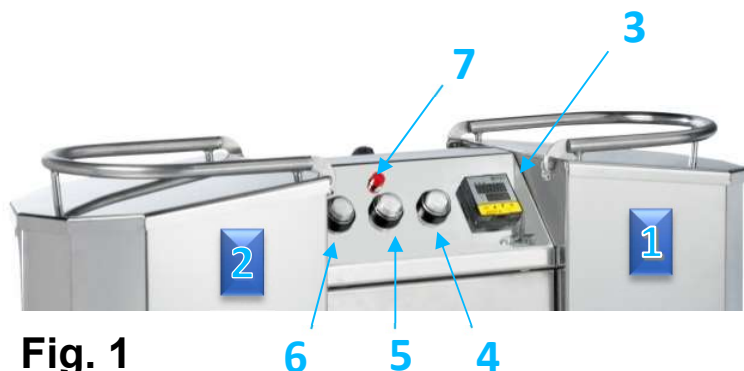


Fig. 1

1. Réservoir d'eau propre
2. Réservoir d'eau souillée
3. Régulateur de température
4. Aspiration de l'eau souillée VACUUM
5. Chauffage de l'eau
6. Fonction douche SPRAY
7. Témoin de dépassement de T°

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

1. Température de l'eau dans le réservoir
2. Température programmée
3. Réglage de la température (augmenter)
4. Réglage de la température (diminuer)

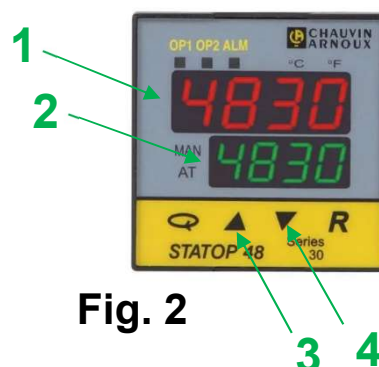


Fig. 2

COMMANDES ET VIDANGE



Fig. 3

1. Raccordement du tuyau de douche
2. Réglage de la pression d'eau
3. Fixation du tuyau d'aspiration
4. Vidange des réservoirs
5. Support du bac pivotant (en option)
6. Crochet pour douche
7. Support du câble d'alimentation

MODE D'EMPLOI

TRES IMPORTANT

**AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ, VÉRIFIER QUE LE RESERVOIR D'EAU PROPRE EST REMPLI ET QUE LE RESERVOIR D'EAU USEE EST VIDE.
NE JAMAIS METTRE EN CHAUFFE SANS EAU.**

1. Brancher l'appareil sur le secteur à l'aide du câble de raccordement
LE BRANCHEMENT DOIT ÊTRE EFFECTUE SUR PRISE MUNIE DE TERRE.
2. Appuyer sur le bouton chauffage de l'eau **5**, sélectionner la température désirée à l'aide du régulateur **3**. Le temps de chauffe est de 8 à 10 minutes pour avoir de l'eau de 20°C à 37°C.
3. Fixer le tuyau de douche à l'endroit prévu **1**.
4. Fixer le tuyau d'aspiration (silicone) sur la sortie **3**.
5. Une fois la température **1** identique à la température **2**, appuyer sur le bouton **6**. Faire couler un peu en appuyant sur le poussoir de la douchette afin de vider le circuit en eau froide et d'avoir de l'eau chaude.
6. Pendant la douche, l'appareil aspire l'eau à l'aide du tuyau **3** par une pression de l'utilisateur sur le bouton **4** qui met en marche la pompe d'aspiration.

Les trois fonctions 4, 5 et 6 doivent être activées afin de ne pas intervenir pendant que l'on douche un patient.

Les réservoirs seront vidangés avec les robinets **4** sur un vidoir, une cuvette de WC **surélevée** ou un écoulement aménagé.

ATTENTION

ASSUREZ-VOUS QUE LE RESERVOIR D'EAU PROPRE CONTIENT TOUJOURS DE L'EAU LORSQUE LA RESISTANCE EST EN FONCTION.

LE NETTOYAGE REGULIER DU FILTRE FIXE SUR LE TUYAU D'ASPIRATION ASSURE UN FONCTIONNEMENT OPTIMUM DU CONCEPT.

Utilisation

- 1- Positionner le chariot afin de favoriser l'accès à toutes les commandes (pied de lit).
- 2- Brancher l'appareil sur une prise de courant adaptée.
- 3- Mettre le chauffage de l'eau en marche.
- 4- Régler la température (thermostat 36,5°C).
- 5- Mettre en place la protection literie ainsi que le drap de bain (par décubitus latéral).
- 6- Positionner le tuyau de récupération des eaux souillées.
- 7- Mettre en marche la fonction douche. (SPRAY)
- 8- Mettre en marche la pompe d'aspiration. (VACUUM)

Après chaque utilisation

- 1 - Rincer ou laver les protections de literie.
- 2 - Vidanger, rincer et désinfecter le bac de récupération de l'eau.
- 3 - Vidanger le bac d'eau propre si nécessaire.
- 4 - Nettoyer le chariot afin de maintenir un état de propreté optimum.

Tous les matériaux entrant dans la fabrication de notre matériel résistent aux différents désinfectants sur le marché à ce jour. Malgré cela, l'utilisation de l'eau de javel est déconseillée.

La protection de literie Réf. : 3530ADL90 et 3530ADL120

Tissu : support 100 % polyester - Armure : tricot 80 gr/m²

Enduction PVC plastifiée : 300 gr/m²

Traitement : « SANITIZED ACTIFRESH »

Classement au feu : M1

Dimensions : 200 cm x 90 cm ou 200 cm x 120 cm- Poids : 1000 gr ou 1300 gr

Marque déposée : Morton International Inc.

« **SANITIZED ACTIFRESH** » : ce traitement intègre un puissant agent antimicrobien et antifongique. Il agit durant toute la vie de la protection en diffusant en permanence ses principes actifs. Il évite ainsi la contamination et les risques d'infections en créant une zone d'inhibition.

Cet article sera passé en blanchisserie après chaque utilisation, lavé selon un programme standard à 80°C maxi. Le séchage sera effectué en séchoir rotatif à 40°C maxi pendant 15 minutes.

La durée de vie moyenne d'une protection est de 150 lavages dans la mesure où le programme de traitement est respecté.

NOUVEAU : votre appareil peut être équipé d'un système de désinfection à l'ozone (option)

GARANTIE

Le matériel est garanti 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement.
La structure et carrosserie sont garanties 10 ans contre la corrosion.

Sont exclus de la garantie :

- Utilisation non conforme.
- Tous problèmes résultant de la chute de l'appareil.
- La réparation des pompes due à l'aspiration de déchets inappropriés (**ongles coupés**) ou au mauvais entretien du filtre.
- Tous les déplacements liés à une utilisation non conforme (réglage de débit d'eau fermé, porte non verrouillée) ne sont pas pris sous garantie.
- La dégradation du tuyau de douche n'est pas prise sous garantie si celui-ci n'est pas démonté journalièrement après utilisation.

LA GARANTIE DES PROTECTIONS DE LITERIE

Est de 150 lavages. (Réf. : 3530ADL90 et 3530ADL120)

Toutes autres dégradations liées au non-respect des consignes de lavage annulent cette garantie.

Ne sont pas garanties :

- Les déchirures,
- Les coupures,
- L'utilisation non conforme aux préconisations.

DECLARATION DE CONFORMITE

L'appareil MODELE **C.H. - EVOLUTION** - IPX 4 - Classe **1** est conforme aux prescriptions figurant dans les caractéristiques appliquées

Norme UNE EN 60 335 – 1

CEI 60601-1-2

Alimentation EN 50081 – 1

EN 50082 – 60



Siège social : rue Ambroise Paré - Z.I. de la Houssoye

59280 BOIS-GRENIER

Tél : 03 20 10 36 90

Site Internet : www.arcania.com / Email : arcania@arcania.com