

FALTBARE ROLLSTUHLRAMPE GEBRAUCHSANWEISUNG

Produkt-Codes: MFR02, MFR04, MFR06, MFR09, MFR12, MFR15, MFR18, MFR21, MFR24

BESTIMMTER ZWECK: Diese Rampen sind als Rollstuhlzubehör für Menschen mit Behinderungen gedacht, um sich in Bereichen mit unterschiedlichen Höhen zurechtzufinden.

VOR DER BENUTZUNG

1. Entfernen Sie die gesamte Verpackung und stellen Sie sicher, dass die Rampen beim Transport nicht beschädigt wurden. Bewahren Sie die Verpackung auf.
2. Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise vor der Benutzung der Rampen sorgfältig durch.
3. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.
4. Auf jeder Rampe befindet sich ein Etikett, auf dem die maximal zulässige Last für die Rampe angegeben ist.

ANBRINGEN

5. Tragen Sie die Rampe mit Hilfe des Griffs an der mittleren Bordsteinkante (siehe Abb. 1).
6. Vergewissern Sie sich, dass der Boden/Untergrund sowohl auf der oberen als auch auf der unteren Ebene fest und stabil ist.
7. Vergewissern Sie sich, dass die Rampe lang genug ist, um die Stufe/Steigung zu überwinden.
8. Platzieren Sie die geschlossene Rampe so, dass sich die mit "TOP" markierte Lippe vollständig auf der oberen Ebene befindet und das Scharnier in der Mitte des gewählten Weges liegt (siehe Abb.2).
9. Öffnen Sie die Rampe vollständig (siehe Abb.3).
10. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass beide Enden der Rampe stabil und über die gesamte Breite gleichmäßig sind.
11. Achten Sie darauf, dass sich die Rampen bei der Benutzung nicht verschieben. Prüfen Sie bei jeder Benutzung, ob die Rampe fest sitzt und stabil ist.



Abb.1



Abb.2



Abb.3

WARTUNG

- Die Rampen sollten an einem sauberen, trockenen Ort gelagert werden.
- Wenn die Rampen in irgendeiner Weise beschädigt oder rutschig werden, sollten sie nicht mehr benutzt werden.
- Die Rampen können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden und müssen vor der Benutzung trocknen.
- Maximal empfohlene Reinigungstemperatur 50°C; bitte erkundigen Sie sich nach weiteren Details zur Verwendung mit industriellen Reinigungsmaschinen
- Für die Entsorgung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an ein Metallrecyclingunternehmen.



Celebrating over
20 YEARS
of better access
for better living

Enable  Access

FALTBARE ROLLSTUHLRAMPE GEBRAUCHSANWEISUNG

Metro[®]
Mobility Products

Produkt-Codes: MFR02, MFR04, MFR06, MFR09, MFR12, MFR15, MFR18, MFR21, MFR24

GARANTIE

- Für die Rampen gilt eine umfassende 12-monatige Garantie bei normalem Gebrauch, es gelten die Bedingungen.
- Bei einer anderen als der veröffentlichten/beabsichtigten Nutzung erlischt die Garantie.
- Die Rampen sind nicht für den dauerhaften Einsatz im Freien konzipiert und dürfen nicht fest installiert werden.
- Jegliche Änderung/Reparatur, die nicht vom Hersteller vorgenommen wird, führt zum Erlöschen der Garantie.



Metro Mobility is a registered trademark of Enable Access, LU7 4UH. We undertake a policy of continual review and research, which may lead to changes in product appearance and specification. Date of Issue: 15 August 2022



Enable Access, Unit R, Cherrycourt Way, Leighton Buzzard, LU7 4UH, UK.



Enable Access Global Ltd, 27 Phibsboro Place, Dublin 7, D07 V20, Republic of Ireland

For technical support or details on your nearest stockist please call 020 8275 0375