

# Rollout-Trackway Gebrauchsanweisung

Produktcodes: RT15, RT25, RT50

## 1. Auspacken und prüfen

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und überprüfen Sie es visuell auf etwaige Schäden oder Mängel.
- Wenn Sie Probleme feststellen, wenden Sie sich an den Lieferanten, bevor Sie fortfahren.

## 2. Standortvorbereitung

- Wählen Sie dort, wo Zugang erforderlich ist, eine feste, stabile Oberfläche, beispielsweise Gras, Kies oder andere unebene Flächen.
- Entfernen Sie losen Schmutz oder Ablagerungen, um eine glatte, stabile Basis zu gewährleisten.

## 3. Positionierung

- Rollen Sie die Fahrbahn entlang des vorgesehenen Weges aus.
- Kürzen Sie den Fahrweg nach Bedarf, damit er um Hindernisse wie Stufen, Blumenbeete oder Fallrohre herum passt.

## 4. Sichern (optional, aber für den Langzeitgebrauch empfohlen)

- Für längere Platzierungen oder zur Verbesserung der Stabilität sichern Sie die Fahrbahn mit Heringen oder Pfählen – oft separat erhältlich.

## 5. Nutzung

- Der Rollout Trackway bietet einen langlebigen, rutschfesten Weg, der sowohl für Rollstuhlfahrer als auch für Fußgänger auf unebenem Gelände geeignet ist.
- Es ist vollständig wetterbeständig und verfügt über eine integrierte Entwässerung, sodass es bei allen Wetterbedingungen zuverlässig ist.

## 6. Reinigung & Wartung

- Entfernen Sie Schlamm und Schmutz mit Standardreinigungsmethoden – die Flexibilität ermöglicht schnelles Trocknen und Wiederverwenden.
- Überprüfen Sie die Oberfläche regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen. Wenn die Oberfläche zu rutschig oder beschädigt wird, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an den Hersteller oder Lieferanten.

## 7. Aufrollen und Aufbewahren

- Wenn Sie die Schiene nicht mehr benötigen, rollen Sie sie einfach zusammen, um sie kompakt zu verstauen.
- Bewahren Sie es an einem trockenen, zugänglichen Ort auf, um es in gutem Zustand zu halten.

## 8. Größen und Spezifikationen

Wählen Sie die richtige Größe basierend auf der Länge des Pfads:

Modellcode	Länge	Breite	Gewicht
RT15	150 cm (4 Fuß 11 Zoll)	90 cm (35,4 Zoll)	12 kg
RT25	250 cm (8 Fuß 2 Zoll)	90 cm	20 kg
RT50	500 cm (16 Fuß 5 Zoll)	90 cm	40 kg

## 9. Hauptvorteile

- Einfach einsetzbar: keine Bauarbeiten erforderlich – sofortiger, reibungsloser Zugriff.
- Langlebig und wetterfest mit Drainage für zuverlässigen Einsatz über alle Jahreszeiten hinweg.
- Vielseitig: ideal für Events, temporäre Aufbauten oder Festinstallationen
- Kostengünstige Alternative zur invasiven Bauweise.

## Zusammenfassung der Checkliste:

RampCentre ist eine eingetragene Marke von Enable Access, LU7 4UH. Wir führen kontinuierliche Überprüfungen und Forschungen durch, die zu Änderungen im Erscheinungsbild und in den Spezifikationen unserer Produkte führen können.  
Ausgabedatum: 09. Dezember 2020



Enable Access, Unit R, Cherrycourt Way, Leighton Buzzard, LU7 4UH, Vereinigtes Königreich.

EC REP Enable Access Global Ltd, 27 Phibsboro Place, Dublin 7, D07 V20, Republik Irland

Für technischen Support oder Informationen zu Ihrem nächstgelegenen Händler

# Rollout-Trackway Gebrauchsanweisung

**Produktcodes:** RT15, RT25, RT50

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche stabil und sauber ist.
- Rollen Sie die Fahrbahn ab und positionieren Sie sie präzise.
- Bei Bedarf so zuschneiden, dass es um Hindernisse herum passt.
- Bei Bedarf mit Heringen/Pfählen sichern.
- Sorgen Sie für vollständige Entwässerung und Rutschfestigkeit.
- Nach Gebrauch reinigen und auf Beschädigungen prüfen.
- Bei Nichtgebrauch aufrollen und ordnungsgemäß aufbewahren.

## **Garantie**

- Rollout Trackway ist für die Nutzung durch Menschen mit Behinderungen/Mobilität konzipiert und optimiert
- Für Rollout Trackway gilt eine umfassende 2-Jahres-Garantie bei normaler Nutzung. Es gelten die Bedingungen.
- Bei einer anderen als der angegebenen/vorgesehenen Verwendung erlischt die Garantie.
- Jegliche Änderung/Reparatur, die nicht vom Hersteller durchgeführt oder von ihm autorisiert wurde, führt zum Erlöschen der Garantie.

RampCentre ist eine eingetragene Marke von Enable Access, LU7 4UH. Wir führen kontinuierliche Überprüfungen und Forschungen durch, die zu Änderungen im Erscheinungsbild und in den Spezifikationen unserer Produkte führen können.  
Ausgabedatum: 09. Dezember 2020



Enable Access, Unit R, Cherrycourt Way, Leighton Buzzard, LU7 4UH, Vereinigtes Königreich.



Enable Access Global Ltd, 27 Phibsboro Place, Dublin 7, D07 V20, Republik Irland

Für technischen Support oder Informationen zu Ihrem nächstgelegenen Händler