

doorline-variwedge™

*4 Größen erhältlich: klein, mittel, groß und extragroß für Türschwellen bis zu 15 cm Höhe



Vor der Verwendung:

- Entfernen und aufbewahren Sie die gesamte Verpackung.
- Lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung der Rampen vollständig durch.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche fest, stabil und in der Lage ist, die vorgesehene Last zu tragen.
- Die Tragfähigkeit der Rampe beträgt 350 kg.
- **Hinweis:** Die Rampen können scharfe Kanten haben; tragen Sie bei der Montage Handschuhe.

Inhalt: Überprüfen Sie den Inhalt und machen Sie sich damit vertraut:

- 1x Variwedge-Bein
- 3x Variwedge-Flachkopfschrauben
- 3x Variwedge-Flanschmuttern
- 1x 10mm Maulschlüssel

Aufbau

1. Messen Sie die Höhe der Türschwelle und wählen Sie die passende Konfiguration (Abb. 1).
2. **Bitte beachten Sie:** Für die niedrigste Einstellung wird das Bein nicht verwendet. Bewahren Sie es mit den Befestigungsteilen für eine spätere Wiederverwendung/Anpassung auf.
3. Montieren Sie die Variwedge-Rampe und das Bein wie erforderlich.
4. **Bitte beachten Sie:** Die Einstellung 10,5 cm nutzt die untersten Schraubenlöcher im Bein und die höchste Einstellung 15 cm nutzt die höchsten Schraubenlöcher im Bein. Die Höheneinstellungen erfolgen in Schritten von 0,5 cm.
5. Stecken Sie die Flachkopfschraube in das entsprechende Loch an einem Ende des Beins (Abb. 2).
6. Stecken Sie die herausragende Schraube in das entsprechende Loch auf der Rückseite der Rampe (Abb. 3).
7. Schrauben Sie die Flanschmutter auf diese Schraube und ziehen Sie sie handfest an (Abb. 4).
8. Stecken Sie die mittleren und endständigen Flachkopfschrauben durch die entsprechenden Löcher (stellen Sie sicher, dass Rampe und Bein parallel sind), bringen Sie die Flanschmutter an und ziehen Sie sie handfest an (Abb. 4).
9. Ziehen Sie alle 3 Muttern mit dem mitgelieferten Maulschlüssel fest.
10. Positionieren/befestigen Sie die Rampe wie erforderlich.
11. Stellen Sie vor dem Anbringen sicher, dass die Rampenoberfläche sauber ist.
12. Auf der Oberfläche der Rampe befinden sich 2 Löcher zur Befestigung nach Bedarf (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten).
13. Die Rampe und das Bein verfügen über Schlüssellöcher, die genutzt werden können, um die Rampe an entsprechend beabstandeten Schrauben in der Türschwelle auszurichten.

Wartung: Sollten die Rampen in irgendeiner Weise beschädigt oder rutschig werden, dürfen sie nicht mehr verwendet werden. Die Rampen können mit normalen Reinigungsprodukten gereinigt werden.

Recycling: Wenn Sie dieses Produkt nicht mehr benötigen, wenden Sie sich bitte an ein Metallrecyclingunternehmen. Wenn Ihnen dieses Produkt von einer örtlichen Behörde zur Verfügung gestellt wurde, wenden Sie sich bitte an diese, um die Entfernung von Ihrem Grundstück zu besprechen.

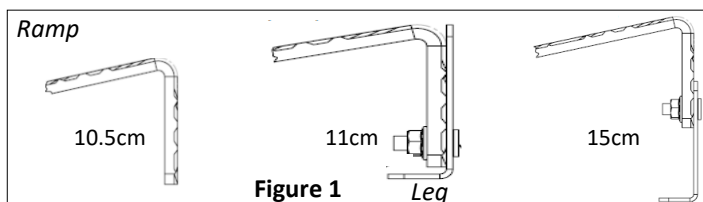


Figure 1

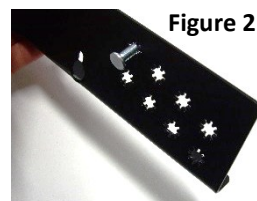


Figure 2



Figure 3

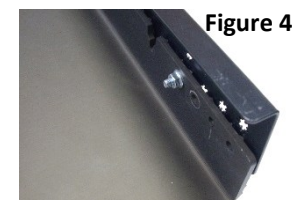


Figure 4

WARRANTY VOID IF LABEL REMOVED OR ILLEGIBLE. UK Patent Application No. 1404579.3 & (European) Registered Community Design No: 002434290/1/3/6. RampCentre is a registered trademark of Enable Access, LU7 4UH. We undertake a policy of continual review and research, which may lead to changes in product appearance and specification. Date of Issue: 02 June 2023. Enable Access, Unit R, Cherrycourt Way, Leighton Buzzard, LU7 4UH, UK. Enable Access Global Ltd, 27 Phibsboro Place, Dublin 7, D07 V20, Republic of Ireland. For technical support or details on your nearest stockist please call 004420 8275 0375.

GARANTIE ERLISCHT, WENN DAS ETIKETT ENTFERNT ODER UNLESERLICH IST. UK Patent Application No. 1404579.3 & (European) Registered Community Design No: 002434290/1/3/6.

RampCentre is a registered trademark of Enable Access, LU7 4UH.

Wir verfolgen eine Politik der ständigen Überprüfung und Forschung, die zu Änderungen am Erscheinungsbild und den Spezifikationen des Produkts führen kann.

Ausgabedatum: 02. Juni 2023.

Enable Access, Unit R, Cherrycourt Way, Leighton Buzzard, LU7 4UH, UK. Enable Access Global Ltd, 27 Phibsboro Place, Dublin 7, D07 V20, Republic of Ireland.

Für technischen Support oder Details zu Ihrem nächstgelegenen Händler rufen Sie bitte an unter 004420 8275 0375.

