


Beschreibung

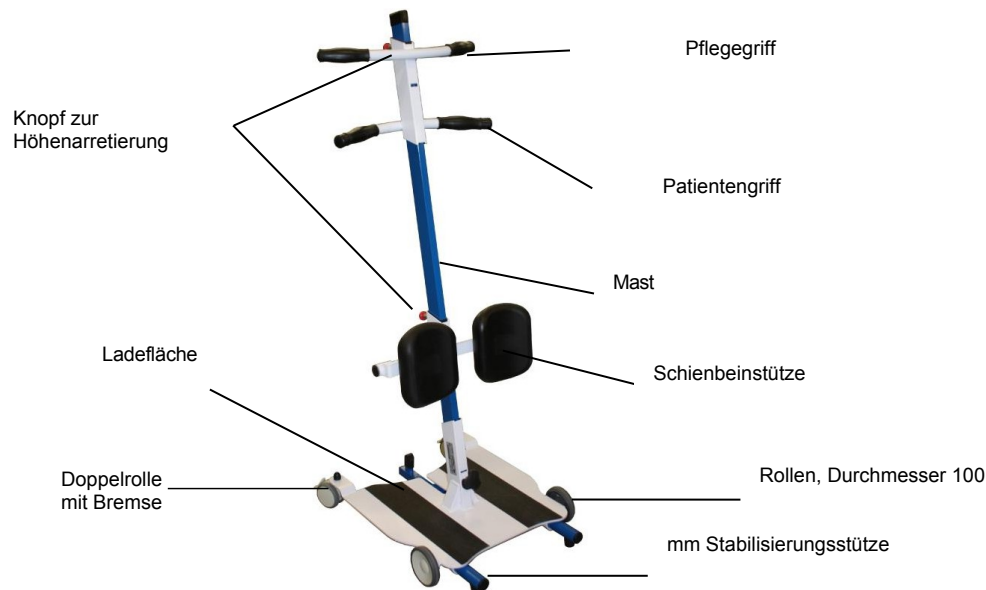

Empfehlungen

Warnhinweise:

- Der Vertic Home ist für den Transfer von einer sitzenden Position in eine andere sitzende Position vorgesehen (vom Bett in den Sessel – vom Ruhesessel in den Rollstuhl ...). Er ermöglicht es, den Patienten aufzurichten und anschliessend zu bewegen.
- Verwenden Sie dieses Gerät niemals alleine. Der Transfer darf nur in Anwesenheit einer dritten Person erfolgen, die den Vertic Home während der gesamten Transferphase stabilisiert und festhält.
- Achtung: Einen Patienten niemals bewegen, wenn die Stabilisierungsstütze nicht vollständig ausgefahren ist.
- Das auf dem Vertic Home angegebene maximale Benutzergewicht von 135 kg darf nicht überschritten werden.
- Verwenden Sie das Vertic Home immer auf einem ebenen Untergrund.

Reinigung:

- Wischen Sie alle Oberflächen des Vertic Home mit einem Vliesstoff ab, der mit einer geeigneten Reinigungslösung getränkt ist (Anios Desinfektionsreiniger für hochgelegene Flächen oder ein gleichwertiges Produkt).
- Unbedingt vermeiden: reiner Alkohol, Aceton, Perchllorethylen und Trichlorethylen, Lösungsmittel, scheuernde Reinigungsmittel und Wachse.
- Reinigen Sie das Vertic Home nicht mit viel Wasser oder einem Hochdruckreiniger.

Vorbeugende Wartung:

- Es wird empfohlen, jährlich eine Inspektion durchzuführen, um die Leistungsfähigkeit des Vertic Home zu erhalten.
- Überprüfen Sie je nach Nutzungshäufigkeit folgende Punkte:
- Befestigung der Masthalterung an der Plattform
- Funktion der Höhenverstellung sowie der Arretierung der Griffe und der Schienbeinstütze
- Sauberkeit und allgemeiner Zustand der Epoxidbeschichtung
- Zustand der Räder prüfen (Befestigung am Rahmen und Funktion der Bremsen)
- Funktionsprüfung des Stützfuss und Überprüfung des Verschleisszustands der rutschfesten Fusskappen



Bedienungsanleitung



6259271
MODULARES
AUFRECHTSTELLGERÄT,
VILGO




6210945
MODULARES AUFSTEHGERÄT, ROLLENSATZ,
VILGO




3 615800 004805
VERTIC HOME BLAU 5017/WEISS

Montage:

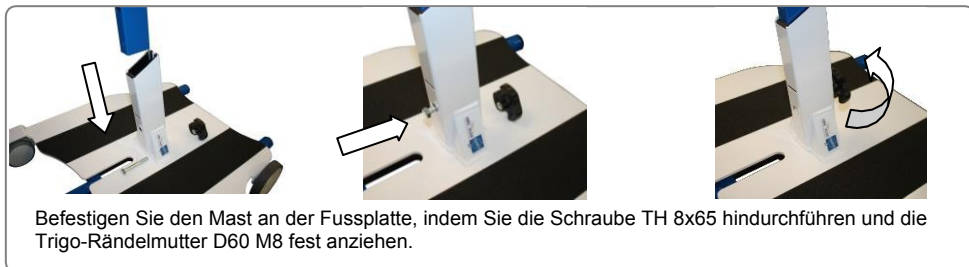


Funktionen:

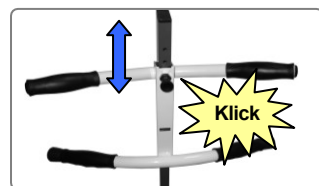


a/ Höhenverstellung der Haltegriffe für Patient und Pflegepersonal:

- Den Arretierknopf ziehen und die Haltegriffe auf die gewünschte Höhe einstellen.
- Den Arretierknopf in einer der 8 Einstellöffnungen arretieren.

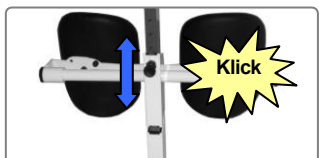


b/ Höhenverstellung der Schienbeinstütze:

- Den Arretierknopf ziehen und die Schienbeinstütze auf die gewünschte Höhe einstellen (unterhalb der Kniescheibe des Patienten).
- Den Arretierknopf in einem der 8 Einstelllöcher arretieren.

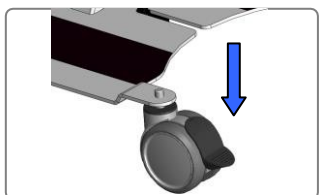

c/ Bremsen:

Der Vertic Home ist mit 2 Rollen mit Bremsen ausgestattet. Die Räder werden durch Drücken der Bremse zwischen den beiden Rollen arretiert. Umgekehrt werden die Rollen zum Entriegeln der Bremsvorrichtung angehoben.

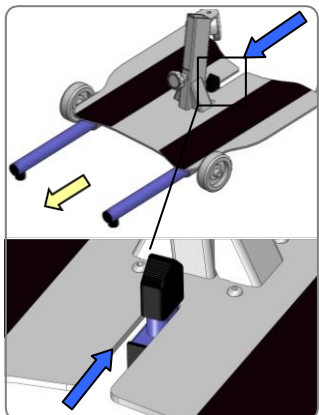

d/ Stützfuß:

Um den Patienten zu verlegen, muss die Stabilisierungsstütze unbedingt ausgefahren werden. Drücken Sie dazu mit dem Fuss auf die schwarze Kappe an der Ladefläche, bis sie bis zum Anschlag ausgefahren ist. Der Patient kann sich dann selbst aufrichten und Sie können ihn verlegen.

WICHTIG: Bewegen Sie den Patienten niemals, wenn die Stabilisierungsstütze eingefahren oder auch nur teilweise ausgefahren ist.

Verwendung des Vertic Home



- 1/ Den *Vertic Home* so in der Nähe des Patienten aufstellen, dass dieser seine Füße auf die Fussplatte stellen kann.
- 2/ Die Höhe der Haltegriffe einstellen. 3/ Die Schienbeinstütze einstellen.
- 4/ **Zieh die Stütze heraus**, indem du die schwarze Kappe **bis zum Anschlag** drückst.
- 5/ Die Bremsen an jedem der Räder arretieren.



- 6/ Den Patienten bitten, die unteren Haltegriffe zu greifen, um sich aufzurichten. Dem Patienten bei Bedarf während des Aufrichtvorgangs helfen und dabei darauf achten, das Gerät seitlich zu stabilisieren.

- 7/ Falls nötig, den Gurt am Becken des Patienten anlegen (*optional*).

- 8/ Lösen Sie die Bremsen.

- 9/ Fassen Sie die oberen Griffe an und bewegen Sie den *Vertic Home*, um den Patienten an den gewünschten Ort zu verlegen.

WICHTIG: Die Bodenfreiheit des *Vertic Home* wurde bewusst reduziert. Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse am Boden (Schwellen, Gegenstände, schräge Flächen...) den Transfer des Patienten behindern oder aus dem Gleichgewicht bringen.



- 10/ Die Räder arretieren und den Patienten bitten, sich hinzusetzen. 11/ Sobald der Patient richtig sitzt, den *Vertic Home* ausfahren und anschliessend die Stützfußstütze einfahren, um das Gerät zu verstauen.

WICHTIG: Achten Sie während der gesamten Transferphase darauf, dass die Stützstange immer ausgefahren ist, und behalten Sie den Patienten im Blick.

