


Descrizione

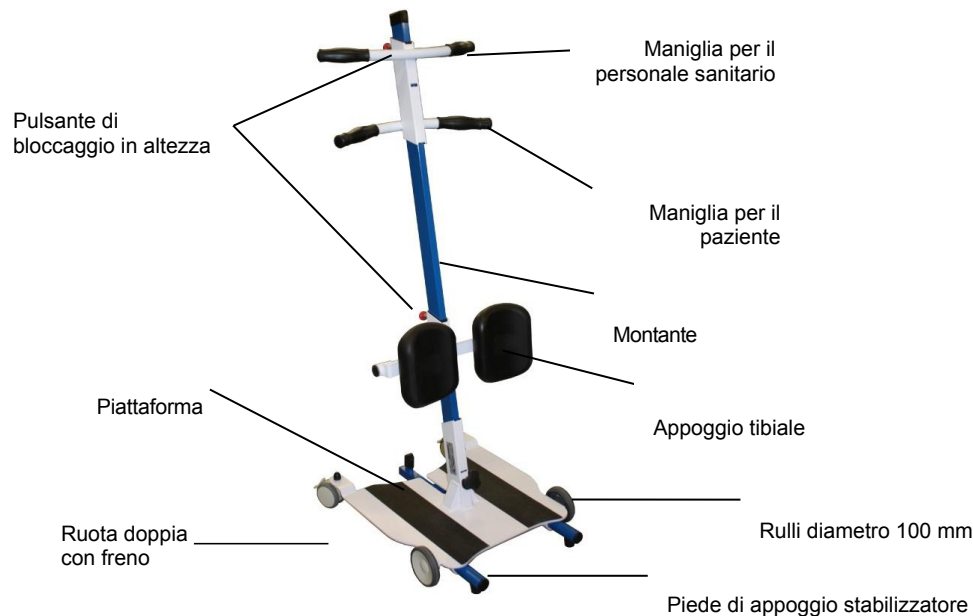

Raccomandazioni

Avvertenze:

- Il *Vertic Home* è destinato a facilitare il trasferimento da una posizione seduta a un'altra posizione seduta (dal letto alla poltrona – dalla poltrona da riposo alla sedia a rotelle, ecc.). Consente di mettere in posizione eretta il paziente e poi di spostarlo.
- Non utilizzare mai questo dispositivo da soli. Il trasferimento può avvenire solo in presenza di una terza persona che stabilizzi e sostenga il *Vertic Home* durante l'intera fase di trasferimento.
- Attenzione: non spostare mai un paziente quando il supporto stabilizzatore non è completamente esteso.
- Non superare il peso massimo dell'utente di 135 kg indicato sul *Vertic Home*.
- Utilizzare sempre il *Vertic Home* su una superficie piana.

Pulizia:

- Pulire tutte le superfici del *Vertic Home* con un panno in tessuto non tessuto imbevuto di una soluzione detergente adeguata (Anios detergente disinfettante per superfici in quota o altro prodotto equivalente).
- È assolutamente vietato l'uso di: alcol puro, acetone, percloroetilene e tricloroetilene, solventi detergenti, prodotti per la pulizia abrasivi e cere.
- Non pulire il *Vertic Home* con acqua abbondante o con getti d'acqua a pressione.

Manutenzione preventiva:

Si consiglia di effettuare un'ispezione annuale per preservare le prestazioni del *Vertic Home*. A seconda della frequenza di utilizzo, controllare i seguenti punti:

- Fissaggio del supporto dell'asta sul piano
- Funzionamento della regolazione in altezza e del bloccaggio delle maniglie e del supporto tibiale
- Pulizia e stato generale del rivestimento epossidico
- Verifica dello stato delle ruote (fissaggio al supporto e funzionamento dei freni)
- Verifica del funzionamento del piedino stabilizzatore e dello stato di usura dei puntali antiscivolo




Istruzioni per l'uso

Codice LPPR



6259271

APPARECCHIO MODULARE
DI VERTICALIZZAZIONE,
VILGO

Codice LPPR



6210945

APPARECCHIO MODULARE PER LA
VERTICALIZZAZIONE, SET DI RUOTE,
VILGO


Codice GTIN




3 615800 004805

VERTIC HOME BLU 5017/BIANCO

Montaggio:

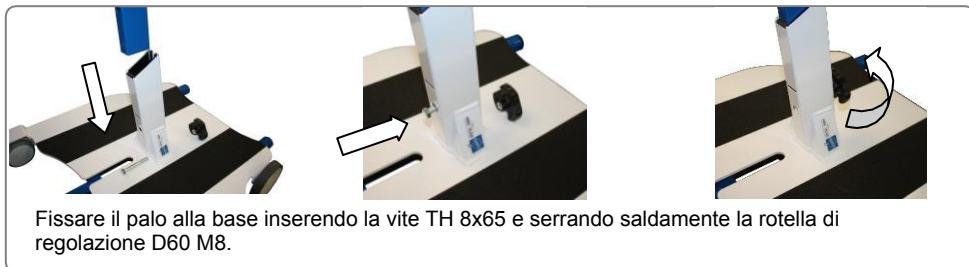


Funzionalità:

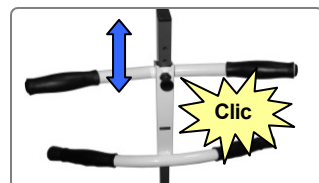


a/ Regolazione in altezza delle maniglie per paziente e operatore:

- . Tirare il pulsante di bloccaggio e regolare le maniglie all'altezza desiderata.
- . Bloccare il pulsante di bloccaggio in uno degli 8 fori di regolazione.

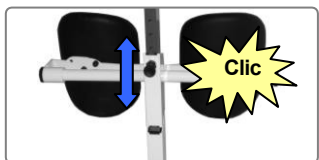


b/ Regolazione in altezza del supporto tibiale:

- . Tirare il pulsante di bloccaggio e posizionare il supporto tibiale all'altezza desiderata (sotto la rotula del paziente).
- . Bloccare il pulsante di bloccaggio in uno degli 8 fori di regolazione.

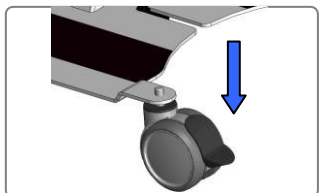

c/ Freni:

Il Vertic Home è dotato di 2 rotelle con freno.
 Per bloccare le ruote è sufficiente premere il freno situato tra le due rotelle.
 Al contrario, per sbloccare le ruote, sollevare il freno.

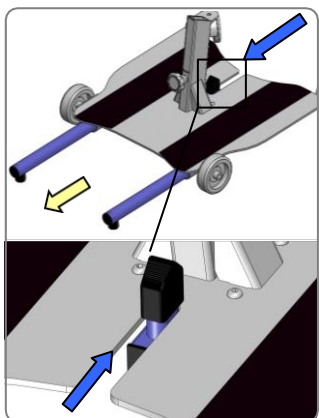

d/ Piede di stabilizzazione:

Per trasferire il paziente, è indispensabile estrarre il piedino stabilizzatore. A tal fine, spingere con il piede l'estremità nera situata sul pianale fino a battuta. Il paziente potrà quindi alzarsi da solo e voi potrete spostarlo.

IMPORTANTE: Non spostare mai il paziente se il piedino stabilizzatore è represso o anche solo parzialmente esteso.

Utilizzo di Vertic Home



- 1/ Posizionare *Vertic Home* vicino al paziente in modo che possa appoggiare i piedi sulla pedana.
- 2/ Regolare l'altezza delle maniglie. 3/ Regolare il supporto tibiale.
- 4/ **Estrarre il sostegno** spingendo il puntale nero **fino a battuta**.
- 5/ Bloccare il freno di ciascuna ruota.



- 6/ Chiedere al paziente di afferrare le maniglie inferiori per alzarsi. Se necessario, aiutare il paziente durante la fase di verticalizzazione, assicurandosi di stabilizzare lateralmente il dispositivo.

- 7/ Se necessario, posizionare la cinghia all'altezza del bacino del paziente (*opzionale*).

- 8/ Sbloccare i freni.

- 9/ Afferrare le maniglie superiori e spostare il *Vertic Home* per trasferire il paziente nel luogo desiderato.

IMPORTANTE: l'altezza da terra del *Vertic Home* è stata volutamente ridotta: assicurarsi che nessun ostacolo sul pavimento (soglia, oggetto, piano inclinato...) ostacoli o sbilanci il trasferimento del paziente.



- 10/ Bloccare le ruote e chiedere al paziente di sedersi. 11/ Una volta che il paziente è correttamente sistemato, estrarre il *Vertic Home* e poi ritrarre il piedino stabilizzatore per riporre il dispositivo.

IMPORTANTE: durante l'intera fase di trasferimento, assicurarsi che il piedino stabilizzatore sia sempre esteso e mantenere un contatto visivo con il paziente.

