



VELA Kinderstuhl mit Power Wheels



Sehen Sie den Stuhl in Gebrauch:

vela.my/child



Power Wheels unterstützt das Kind dabei:

- ✓ Selbstständig zu Hause und in der Schule zu sein
- ✓ Energie zu sparen und die Teilnahme zu steigern
- ✓ Über längere Zeiträume jeden Tag aktiv zu bleiben

Der VELA Tango 600ES mit Power Wheels bietet alle Vorteile eines VELA-Kinderstuhls zusätzlich zur Möglichkeit, sich unabhängig fortzubewegen. Der Stuhl ist für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen konzipiert, damit sie leichter am Unterricht teilnehmen, mit Freunden soziale Kontakte pflegen und ihre Lernfähigkeit verbessern können. Wenn das Kind sich selbstständig bewegen möchte, muss es nur die Power Wheels einschalten und los geht's.

Erreichen Sie unabhängige Mobilität: Wenn dem Kind die Energie oder Fähigkeit fehlt, aufzustehen, den Stuhl zu bewegen und sich mehrmals am Tag hinzusetzen, ist es möglich, Kraft zu sparen, indem man die Power Wheels nutzt. So kann das Kind seine gesamte Energie auf die Aktivität richten.

Verbessern Sie die Lebensqualität des Kindes: Erhöhte Mobilität zu Hause oder in der Schule, ohne von anderen abhängig zu sein, um sich zu bewegen, verbessert das Selbstwertgefühl und die Lebensqualität des Kindes. Die Steuerung ist einfach zu bedienen, und die geringe Kraft und Geschwindigkeit machen sie für Kinder geeignet.

Unser bewährtes Sitzsystem erleichtert es, sich zu konzentrieren und beispielsweise am Unterricht teilzunehmen. Die stützenden Armlehnen und die Radbremse helfen dabei, die Konzentration auf eine bestimmte Aufgabe zu richten, während sie gleichzeitig Sicherheit bieten und ein Gefühl der Geborgenheit schaffen.

Der VELA Tango 600ES mit Power Wheels bietet alle Vorteile des VELA-Stuhls: Das Kind kann seine Sitzhöhe selbstständig für eine bestimmte Aktivität ändern. Wenn die elektrische Höhenverstellung genutzt wird, um den Sitz auf die niedrigste Position einzustellen, kann das Kind leichter aufstehen und sich in den Stuhl setzen.

VORTEILE

- :: Der stabile Standfuß und die zentrale Bremse bieten Sicherheit und Unterstützung während der Aktivitäten.
- :: Der Stuhl „wächst“ mit dem Kind, da Sitz und Rückenlehne auf verschiedene Größen angepasst werden können.
- :: Eine benutzerfreundliche elektrische Höhenverstellung hilft dem Kind, sich auf den Stuhl zu setzen und ihn wieder zu verlassen, und sorgt für eine optimale Sitzhöhe bei Aktivitäten und Teilnahme.
- :: Das Kind kann die Power Wheels nach Bedarf nutzen, um den ganzen Tag über aktiv zu bleiben und Energie zu sparen, während es selbstständig bleibt.

STANDARDKONFIGURATION



VELA Tango 600ES mit Power Wheels

MESSUNGEN UND GEWICHT

Höhenverstellung	Elektrisch: 200 mm oder 300 mm Bewegung
Sitzhöhe (Gemessen von der Unterkante des Sitzes) Je nach Art des Sitzes ist die folgende Höhe zu addieren: E-Sitz: +6,0 cm Alle Sitzhöhen sind ohne Gewichtsbelastung gemessen	bei 200 mm: 34,5-54,5, 36,5-56,5 cm, 38,5-58,5 cm , 40,5-60,5 cm bei 300 mm: 39-69 cm, 41-71 cm 43-73 cm, 45-75 cm, 47-77 cm
Sitz, breite x tiefe	32 x 35 cm (E2-Sitz) 36 x 43 cm (E3-Sitz) 40 x 47 cm (E4-Sitz)
Sitzneigung	6° vorwärts, 9° rückwärts
Sitztiefe	30-35 cm (E2-Sitz) 35-43 cm (E3-Sitz) 39-47 cm (E4-Sitz)
Rückenlehne, breite x höhe	26 x 26 cm (E2-Rückenlehne) 28 x 35 cm (E3-Rückenlehne)
Neigung der Rückenlehne	12° vorwärts, 15° rückwärts
Höhenverstellung der Rückenlehne	0-11 cm (E3-Rückenlehne)
Armlehne (PU-Polsterung), breite x länge	8 x 26 cm
Armlehne, höhenverstellbar	0-19 cm
Abstand zwischen den Armlehnen, einstellbar	26-35 cm (E2-Sitz) 31-40 cm (E3-Sitz) 34-40 cm (E4-Sitz)
Armlehnposition in Bezug auf den Sitz	17 cm (8,5 cm vorwärts, 8,5 cm rückwärts) (E3-Sitz)
Sitzrotation	Nein
Fußstütze (Typ-S), einstellbar	21-31 cm, 26-41 cm
Bremse	Manuell
Größe des Gestells	55 x 55 cm
Gewicht des Stuhls	38 kg
Maximale Gewichtsbelastung	80 kg
Empfohlenes Benutzergewicht	15-50 kg
Geschwindigkeit (Power Wheels)	0-4 km/h. Kann über den Joystick an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden
Sicherheit bezüglich Hub und Power Wheels	Die Antriebsräder schalten sich ab, wenn die Sitzhöhe um mehr als 10 cm ansteigt
Power Wheels, Funktion	Die Räder müssen heruntergeklappt sein und den Boden berühren, um Traktion zu gewährleisten
Aufladen	Täglich aufladen
Artikel-Nr.	61013 + 929449 (Wählen Sie die Position des Joysticks auf der rechten oder linken Seite des Stuhls)

*Standardabmessungen sind fett gedruckt markiert

Hinweis: Power Wheels sind kein Ersatz für einen elektrischen Rollstuhl, sondern eine Unterstützungsfunktion, um den Stuhl fortzubewegen. Eine Faustregel besagt, dass der Stuhl tagsüber aufgeladen werden muss, wenn die Power Wheels häufiger als die Füße genutzt werden, um sich fortzubewegen.

POLSTER UND ZUBEHÖR

Die Standardpolsterung des VELA Tango 600ES ist ein schwarzer Mionetta satch-Stoff, der eine gute Haltbarkeit aufweist und wasserabweisend ist.

Die Stühle können mit einer breiten Palette an Zubehör und elektrischen Lösungen bestellt werden, um den Stuhl an die Bedürfnisse des Kindes anzupassen. Dies kann in Bezug auf Polsterung, Komfort, Unterstützung, Griffbarkeit und elektrische Einstellung sein.

HOHE QUALITÄT - HERGESTELLT IN DÄNEMARK

Bei VELA fertigen wir seit 1935 Qualitätsprodukte für sitzende Menschen. Unser Ziel ist es, das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Menschen, die unsere Produkte nutzen, zu verbessern.

Unsere Stühle sind täglich starker Beanspruchung ausgesetzt. Daher verwenden wir bei VELA robuste mechanische Teile und beziehen die Stühle mit besonders langlebigen Materialien, um sie über viele Jahre hinweg sauber und funktionsfähig zu halten.

Alle VELA-Stühle sind nach der europäischen Medizinprodukteverordnung 2017/745 CE-gekennzeichnet. Zudem sind wir nach ISO9001 und ISO14001 zertifiziert, international anerkannte Standards für Qualität und Umwelt.