



VELA Tango 700 & 700E



VELA Tango 700

Seduta e schienale Active (Small)



VELA Tango 700E

Seduta e schienale Contour (Medium)



Video instruction:
vl1935.dk/t700e

Le sedie VELA Tango 700/700E sono gli ultimi modelli della popolare sedia VELA. Le sedie permettono di essere indipendenti a casa e al lavoro con un design intuitivo. Sedendoti su una sedia VELA, puoi svolgere le normali attività che svolgi in piedi in modo sicuro e confortevole, senza sprecare le tue energie. Tutto questo grazie a un freno a mano sicuro, ruote di facile scorrimento e un comfort di seduta stabile.

La VELA Tango 700E presenta un sollevatore elettrico che si alza e si abbassa premendo un pulsante. Per questo motivo, è possibile raggiungere le cose sullo scaffale più alto o in basso dell'armadio.

Il sollevatore elettrico può anche aiutarti ad alzarti dalla sedia. Se hai un notevole equilibrio e forza nelle gambe per utilizzare una regolazione manuale dell'altezza, puoi scegliere una VELA Tango 700.

Grazie alle ruote morbide e larghe, è facile spostare la sedia in modo sicuro e scorrevole, anche su piastrelle e pavimenti irregolari. Inoltre, la sedia è disponibile in varie altezze di seduta per assicurare che si adatti perfettamente alle tue dimensioni.

Un freno a mano facilmente accessibile fornisce sicurezza durante le attività quotidiane, quindi non devi preoccuparti che la sedia si allontani da te.

Presentiamo due nuove serie con sedute e schienali dal design ergonomico per soddisfare le tue esigenze di comfort e supporto. Volta pagina per maggiori informazioni.

BENEFICI

- :: Siediti ed esegui attività che normalmente svolgi in piedi senza sprecare le tue energie
- :: Sollevatore elettrico agevole e di facile utilizzo che garantisce una regolazione dell'altezza della sedia facile e sicura
- :: Sedia stabile e sicura con freno centrale e braccioli di supporto
- :: "Cammina" sulla sedia in modo sicuro e confortevole
- :: Eccellente supporto e comfort di seduta

CONFIGURAZIONE STANDARD

	VELA Tango 700	VELA Tango 700E
Regolazione dell'altezza	Molla a gas: movimento 100 mm, 150 mm o 200 mm	Elettrico: movimento da 200 mm o 300 mm
Altezza seduta (misurata dal bordo inferiore del sedile) Aggiungi +6,0 cm per l'altezza con sedile incluso	a 100 mm: 32,5-42,5 cm, 34,5-44,5 cm, 36,5-46,5 cm a 150 mm: 36,5-51,5 cm, 38-53 cm 40-55 cm, 42-57 cm a 200 mm: 43-63 cm, 45-65 cm 47-67 cm, 49-69 cm	a 200 mm: 35-55 cm, 36,5-56,5 cm 38,5-58,5 cm, 40,5-60,5 cm, 42,5-62,5 cm a 300 mm: 41,5-71,5 cm, 43-73 cm 45-75 cm, 47-77 cm, 49-79 cm
Tutte le altezze dei sedili sono misurate senza carico di peso		
Seduta , larghezza x profondità	X-small: 40 x 40 cm Small: 44 x 44 cm Medium: 47 x 47 cm Large/X-large: 50 x 50 cm	X-small: 40 x 40 cm Small: 44 x 44 cm Medium: 47 x 47 cm Large/X-large: 50 x 50 cm
Angolo del sedile	10° avanti, 15° indietro	10° avanti, 15° indietro
Schienale , larghezza x altezza	Active: X-small: 38 x 22 cm Small: 38 x 30 cm Medium: 40 x 40 cm Large/X-large: 40 x 45 cm Contour: Small: 36 x 38 cm Medium: 39 x 43 cm Large/X-large: 41 x 48 cm	Active: X-small: 38 x 22 cm Small: 38 x 30 cm Medium: 40 x 40 cm Large/X-large: 40 x 45 cm Contour: Small: 36 x 38 cm Medium: 39 x 43 cm Large/X-large: 41 x 48 cm
Angolazione schienale	4° avanti, 22° indietro	4° avanti, 22° indietro
Regolazione in altezza dello schienale	10 cm	10 cm
Bracciolo (imbottitura in PU) , larghezza x lunghezza	9 x 30 cm	9 x 30 cm
Altezza del bracciolo , regolabile	17-33 cm (i braccioli pieghevoli sono accessori)	17-33 cm (i braccioli pieghevoli sono accessori)
Distanza tra i braccioli , regolabile	38,5-52,5 cm	38,5-52,5 cm
Dimensione telaio	55 x 55 cm	55 x 55 cm
Peso della sedia	25,5 kg	33,5 kg
Carico del peso massimo	160 kg	160 kg
Peso utente consigliato , max.	130 kg	145 kg
Rotazione del sedile	90° a destra/90° a sinistra (la rotazione può essere deselezionata)	90° a destra/90° a sinistra (la rotazione può essere deselezionata)
Articolo n.	71001	71011

*Le dimensioni standard sono contrassegnate in grassetto

Nota: tutte le cifre sono arrotondate allo 0,5 cm più vicino.

ECCEZIONALE COMFORT DI SEDUTA

Con una VELA Tango 700/700E, puoi scegliere tra avere due diverse serie di sedute e schienali dal design ergonomico:

Sedute e schienali "Active" offrono un comfort eccezionale e un supporto leggero. Sono disponibili in varie dimensioni per adattarsi al tuo corpo e alle tue esigenze di supporto. Sedute e schienali "Contour" offrono un comfort eccellente e un alto grado di supporto. Sia il sedile che lo schienale hanno un supporto laterale sagomato che aiuta a stabilizzare la posizione di seduta.

Il tessuto standard è Renewed Loop, composto al 100% da poliestere riciclato (Oeko-Tex Standard 100 & EU Ecolabel). Questo tessuto offre un'eccellente resistenza all'usura, un comfort di seduta confortevole e elevati standard di pulizia.

ALTA QUALITÀ PRODotta IN DANIMARCA DAL 1935

In VELA realizziamo prodotti di qualità per le persone sedute. Ci impegniamo per un maggiore benessere e una migliore qualità della vita per le persone che utilizzano i nostri prodotti.

Riteniamo che le nostre sedie siano spesso esposte a una forte usura per molte ore al giorno. Pertanto, VELA utilizza parti meccaniche robuste e le sedie sono rivestite con materiali extra resistenti per mantenerle pulite e funzionali a lungo.

Tutte le sedie VELA sono marchiate CE e sono conformi alle normative UE applicabili. Inoltre, siamo certificati ISO9001 e ISO14001 che sono standard riconosciuti a livello internazionale in materia di ambiente e qualità.