




Benutzerhandbuch

Vorrichtung zum Zuführen und Sammeln von Wasser auf einem Bett

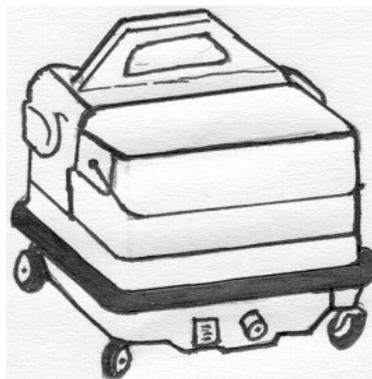

Modell für den Hausgebrauch

Ind	Datum	Autor	Änderungen
0	09.01.2024	N. Sauvage	Erster Entwurf
A	18.06.2025	N. Sauvage	Änderung von Standards

Dieses kompakte und leichte Gerät ist als Bettdusche für den Hausgebrauch gedacht.

Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten: Vermietung, häusliche Pflege, Privatpersonen, Menschen mit Behinderung, Shampoo.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.

EMPFEHLUNGEN

Beachten Sie vor der Verwendung des Geräts unbedingt Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass die Tanks sauber sind.

Dieses Gerät darf nur von Personen verwendet werden, die diese Anleitung gelesen haben.


VERWENDUNG

- Füllen Sie den Frischwassertank **(B)** mit warmem Wasser (40 °C) und setzen Sie den mitgelieferten Deckel wieder auf.
- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an.
- Verbinden Sie den (Silikon-)Saugschlauch mit **(F)** und legen Sie ihn auf den Bettschutz.
- Verbinden Sie den Duschschauch mit der Kupplung **(E)**.
- Starten Sie die verschiedenen Funktionen mit **(D)** und **(G)**.
- Steuern Sie den Wasserfluss mit dem Knopf am Duschkopf.


Nach dem Duschen der Person:

- Stoppen Sie die Duschkopf-Funktion **(D)**.
- Drücken Sie den Knopf am Duschkopf, um den Kreislauf zu entleeren.
- Stoppen Sie das Absaugen des restlichen Wassers und beenden Sie den Vorgang. **(G)**.
- Trennen Sie den Saugschlauch von **(F)**.
- Trennen Sie den Duschschauch durch Drücken des Kupplungsringes **(E)**.

Vorsicht! Dieses Gerät ist nur für die Verwendung mit Wasser bestimmt.

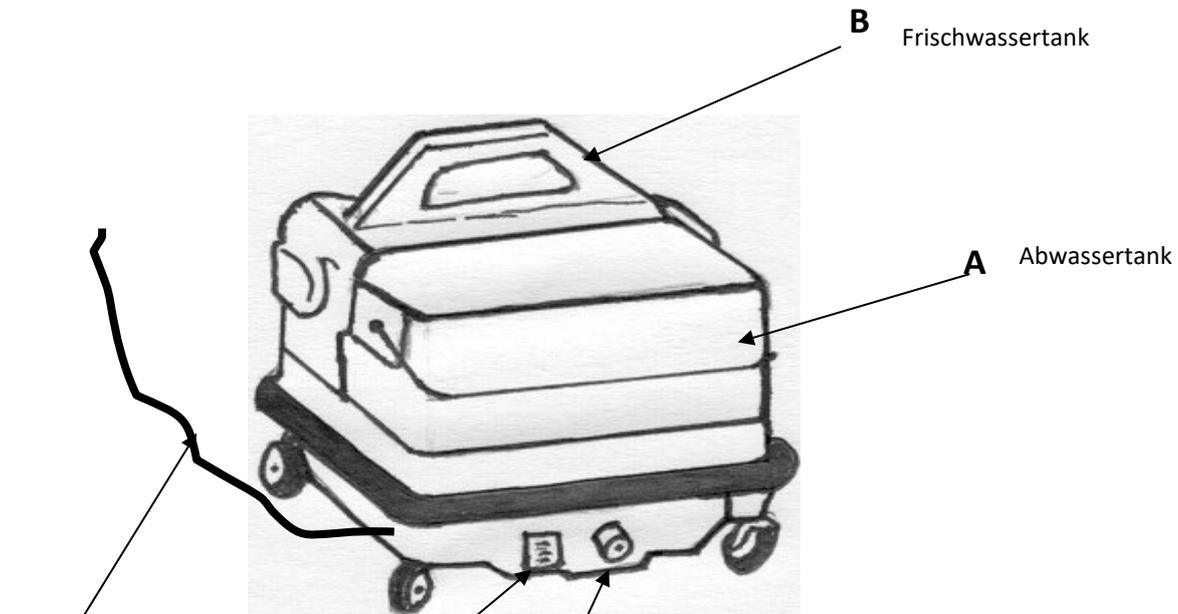

- C:** Netzkabel
- D:** Wasserzufuhrschalter
- E:** Duschschauch-Anschluss
- F:** Saugschlauch-Anschluss
- G:** Wasser-Saugschalter
- H:** Pumpen-Schutzfilter

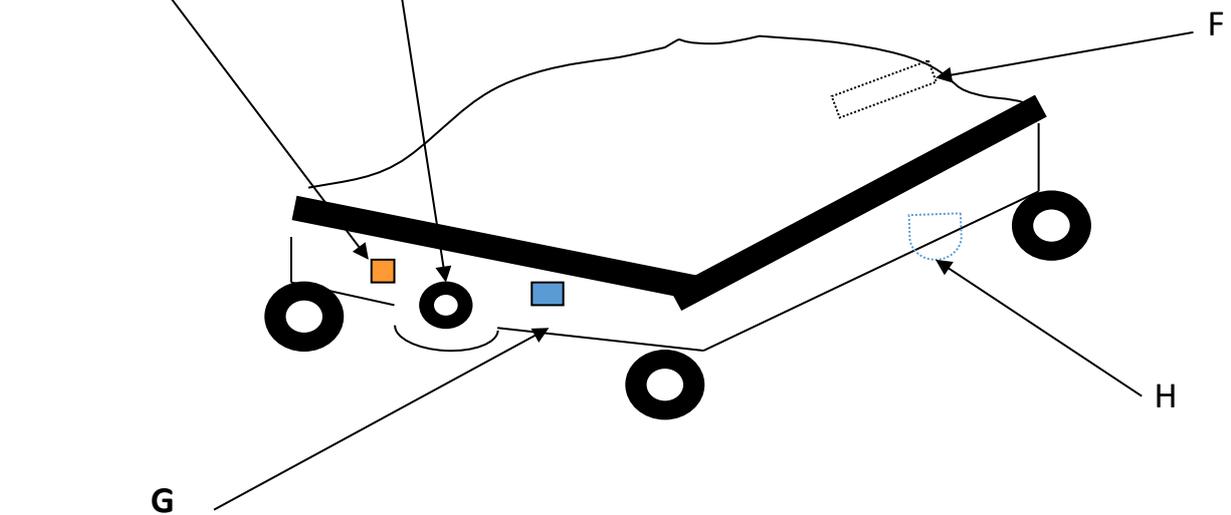

Ich: Eine regelmäßige Reinigung des Filters (H) wird empfohlen.

Es lässt sich leicht durch Abschrauben des transparenten Behälters zerlegen.

TECHNISCHE DATEN

Länge	0,55 m
Breite	0,38 m
Höhe	0,40 m
Volumen	0,08 m
Gewicht	9,3 kg
Frischwassertank	9 Liter
Abwassertank	9 Liter
Länge des Duschschlauchs	2 m
Länge des Netzkabels	10 m
Länge des Saugschlauchs	2 m

Zwei 220-Volt-Membranpumpen übernehmen die Wasserversorgung und -rückgewinnung.

GARANTIE UND KUNDENDIENST

werden von uns oder unseren Lieferanten bereitgestellt.

EG-Konformitätserklärung

Hiermit wird erklärt, dass die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit der Europäischen Verordnung 2014/35/EU hergestellt wurden

**Hauptsitz: rue Ambroise Paré - La Houssoye Industrial Estate
59280 BOIS-GRENIER
Tel: 03 20 10 36 90
Website: www.arcania.com / E-Mail: arcania@arcania.com**