




# MANUEL D'UTILISATION

Appareil destiné à apporter et à récupérer l'eau sur le lit

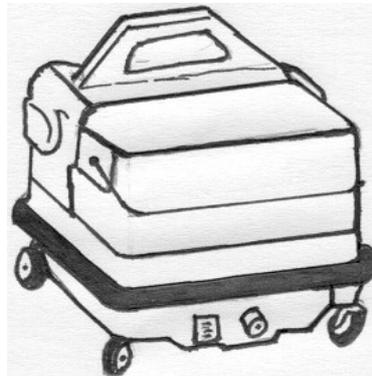

## Modèle Domicile

Ind	Date	Rédacteur	Modifications
0	09/01/2024	N.Sauvage	Rédaction initiale



Cet appareil, compact et léger, est destiné à apporter la douche au lit à domicile.

Usages multiples : location, association d'aide à domicile, particuliers, handicapés, shampooing.

Le fabricant se réserve le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis.

## **RECOMMANDATIONS**

**Avant l'utilisation de l'appareil, il est important de :**

- S'assurer que la tension du réseau électrique correspond à la tension indiquée sur la plaque constructeur.
- S'assurer de l'état de propreté des réservoirs.

Cet appareil ne doit être utilisé que par des personnes ayant pris connaissance du présent manuel.


## **UTILISATION**

- Remplir le réservoir **(B)** d'eau propre chaude (40°) et remettre le couvercle prévu.
- Raccorder l'appareil à une prise de courant adaptée.
- Brancher le tuyau d'aspiration (en silicone) sur **(F)** et le positionner sur la protection de literie.
- Raccorder le tuyau de douche au coupleur **(E)**.
- Mettre en marche les différentes fonctions avec **(D)** et **(G)**.
- Gérer l'apport d'eau par le bouton poussoir de la douchette.

**Après avoir douché la personne :**

- Arrêter la fonction douchette **(D)**.
- Appuyer sur le bouton poussoir de la douchette afin de vider le circuit.
- Finir d'aspirer l'eau restante et arrêter la fonction **(G)**.
- Débrancher le tuyau d'aspiration de **(F)**.
- Désaccoupler le tuyau de douche en repoussant la bague du coupleur **(E)**.

Attention ! Cet appareil est conçu pour utiliser de l'eau uniquement.

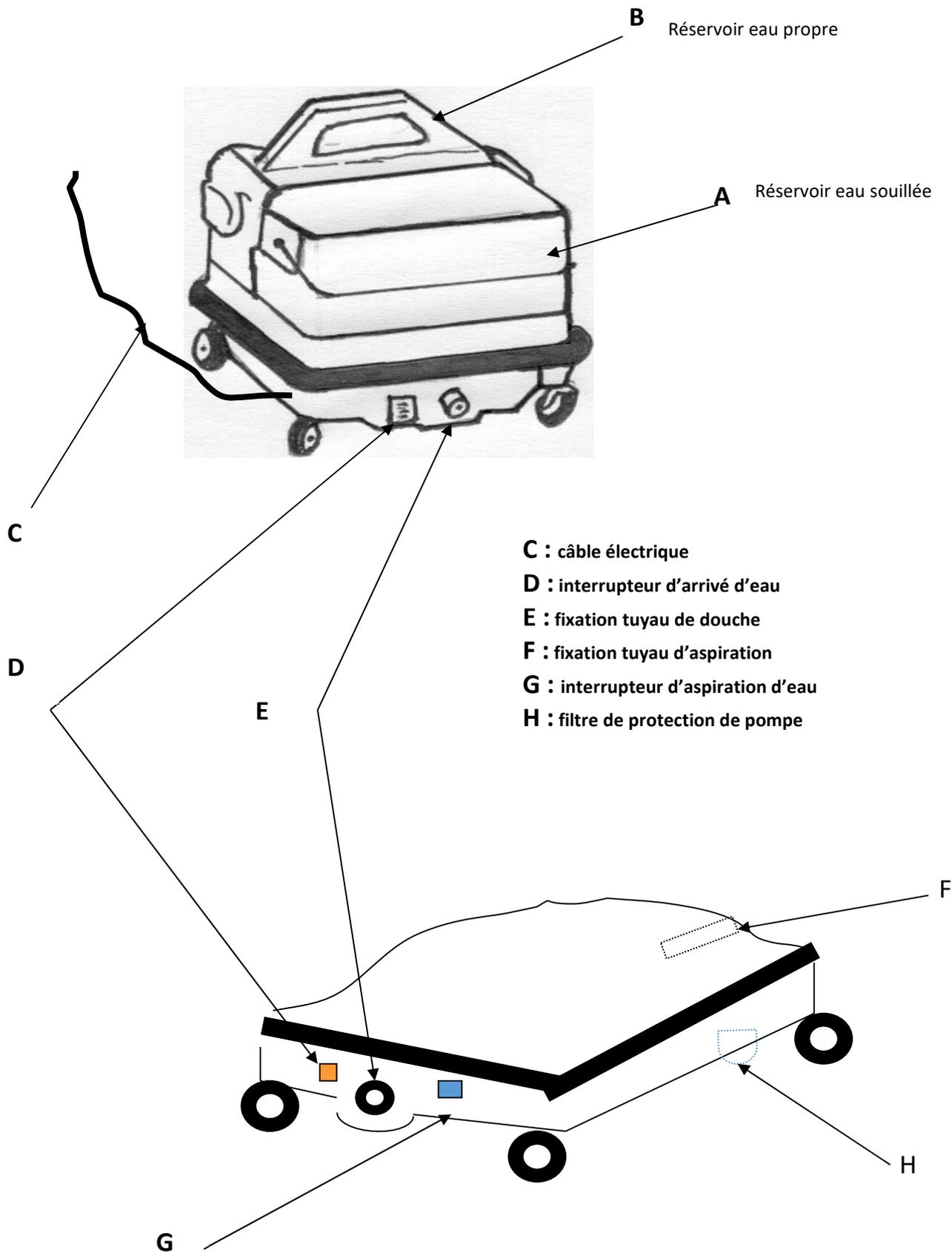

**IMPORTANT :** Il est recommandé de nettoyer régulièrement le filtre (H).  
 Celui-ci se démonte aisément en dévissant le bocal transparent.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur .....	0,55 m
Largeur .....	0,38 m
Hauteur .....	0,40 m
Volume .....	0,08 m
Poids .....	9,3 Kg
Réservoir eau propre .....	9 litres
Réservoir eau sale .....	9 litres
Longueur tuyau de douche .....	2 m
Longueur câble électrique .....	10 m
Longueur du tuyau d'aspiration .....	2 m

2 pompes à membrane 220 volts assurent les fonctions d'apport et de récupération d'eau.

### **LA GARANTIE ET LE S.A.V.**

sont assurés par nous ou nos revendeurs.

### **Déclaration de conformité C E**

Nous déclarons que les produits décrits dans  
cette brochure sont construits selon la  
réglementation Européenne CEI 335-2-2  
EN 60355-2-68, 73/23 CEE, 89/336 CEE

**Siège social : rue Ambroise Paré - Z.I. de la Houssoye**

**59280 BOIS-GRENIER**

**Tél : 03 20 10 36 90**

**Site Internet : [www.arcania.com](http://www.arcania.com) / Email : [arcania@arcania.com](mailto:arcania@arcania.com)**