




MANUALE D'USO

Dispositivo progettato per fornire e raccogliere acqua su un letto

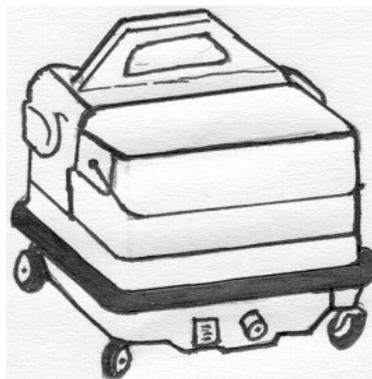

Modello domestico

Ind	Data	Autore	Modifiche
0	09/01/2024	N. Sauvage	Bozza iniziale
A	18/06/2025	N. Sauvage	Modifiche standard

Questo dispositivo compatto e leggero è concepito come doccia da letto per uso domestico.

Molteplici utilizzi: noleggio, assistenza domiciliare, soggetti privati, persone disabili, shampoo.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

CONSIGLI

Prima di utilizzare il dispositivo, è importante quanto segue:

- assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta;
- assicurarsi che i serbatoi siano puliti.

Questo dispositivo può essere utilizzato solo da persone che abbiano letto il presente manuale.


USO

- Riempire il serbatoio dell'acqua pulita **(B)** con acqua calda (40°C) e rimettere il coperchio in dotazione.
- Collegare il dispositivo a una presa di alimentazione adatta.
- Collegare il tubo di aspirazione (in silicone) a **(F)** e porzionarlo sulla protezione del letto.
- Collegare il tubo flessibile della doccia al raccordo **(E)**.
- Avviare le diverse funzioni con **(D)** e **(G)**.
- Controllare il flusso dell'acqua con il pulsante sulla testina della doccia.

Dopo aver fatto la doccia alla persona:

- Interrompere il funzionamento della testina della doccia **(D)**.
- Premere il pulsante della testina della doccia per vuotare l'impianto.
- Interrompere l'aspirazione dell'acqua rimanente ed interrompere il funzionamento **(G)**.
- Scollegare il tubo flessibile di aspirazione da **(F)**.
- Scollegare il tubo flessibile della doccia premendo l'anello del raccordo **(E)**.

Attenzione! Questo dispositivo è progettato per l'uso solo con acqua.

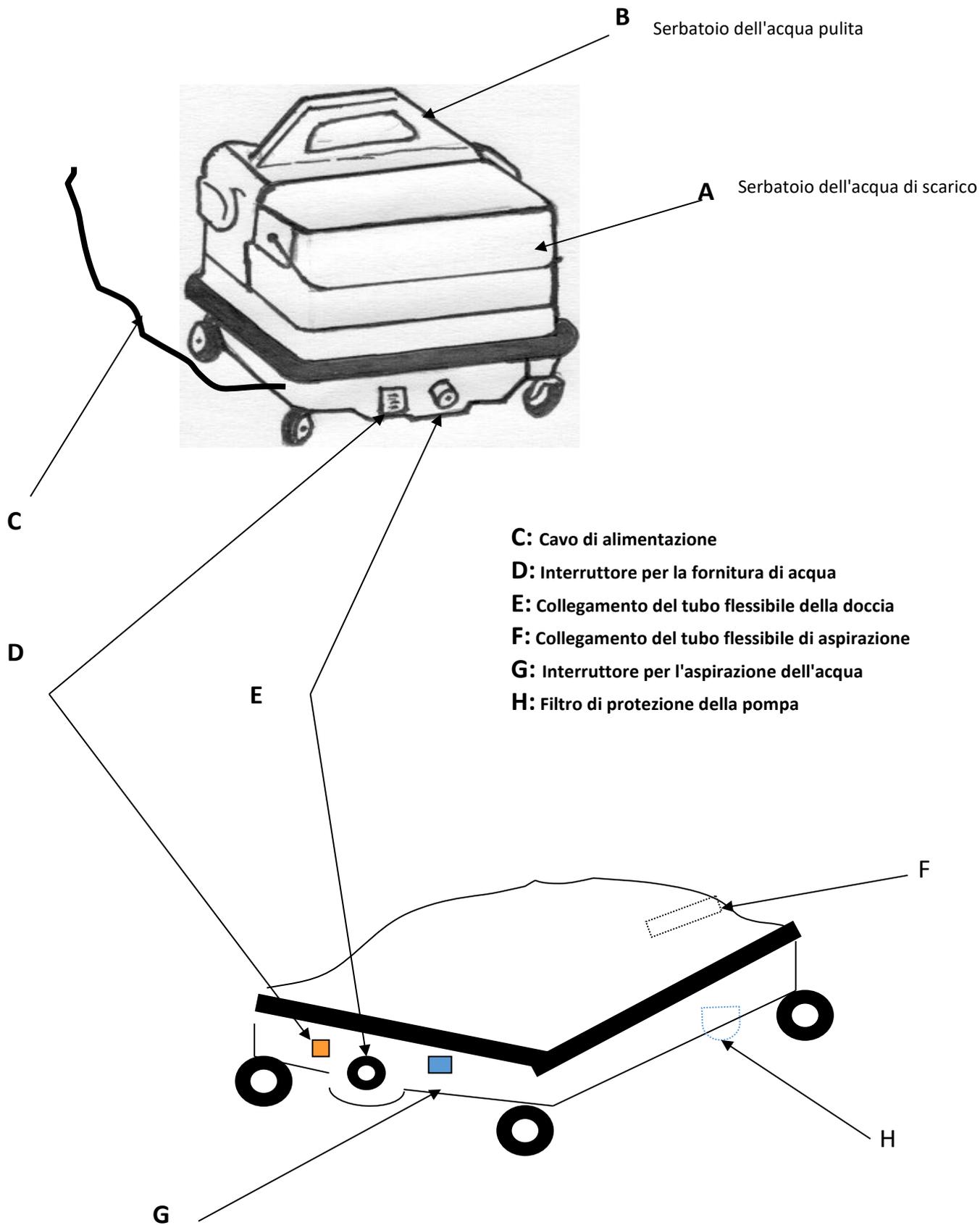

**IMPORTANTE: Si consiglia la pulizia regolare del filtro (H).
Può essere smontato direttamente svitando il contenitore trasparente.**

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	0,55 m
Larghezza	0,38 m
Altezza	0,40 m
Volume	0,08 m
Peso	9,3 Kg
Serbatoio dell'acqua pulita	9 litri
Serbatoio dell'acqua di scarico	9 litri
Lunghezza del tubo flessibile della doccia	2 m
Lunghezza del cavo di alimentazione	10 m
Lunghezza del tubo flessibile di aspirazione	2 m

Due pompe a membrana da 220 volt assicurano le funzioni di fornitura e recupero dell'acqua.

GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA
vengono fornite da noi o dai nostri agenti.

Dichiarazione di conformità CE

Si dichiara che il prodotto descritto nel
presente catalogo è stato prodotto in conformità con
il Regolamento Europeo 2014/35/EU

Sede centrale: rue Ambroise Paré - La Houssoye Industrial Estate
59280 BOIS-GRENIER
Tel.: 03 20 10 36 90
Website: www.arcania.com / E-mail: arcania@arcania.com