

RAMPA PIEGHEVOLE PER SEDIA A ROTELLE

ISTRUZIONI PER L'USO

®

Codici prodotto: MFR06, MFR09, MFR12, MFR15, MFR18, MFR21, MFR24

SCOPO PREVISTO: Queste rampe sono pensate per essere utilizzate come accessori per sedie a rotelle da persone con disabilità, per consentire loro di spostarsi in aree di diverse altezze.

PRIMA DELL'USO

- Rimuovere tutto l'imballaggio e assicurarsi che le rampe non abbiano subito danni durante il trasporto. Conservare l'imballaggio.
- Leggere attentamente le istruzioni e i testi di avvertenza prima di utilizzare le rampe
- Conservare le istruzioni per riferimento
- Su ogni rampa troverete un'etichetta che indica il carico massimo consentito per la rampa.

PER DISTRIBUIRE

1. Trasportare la rampa utilizzando la maniglia posta sul marciapiede centrale (vedi foto 1).
2. Assicurarsi che il terreno/la superficie, sia ai livelli superiore che inferiore, sia solida e stabile.
3. Controllare che la rampa sia sufficientemente lunga da coprire il gradino/la salita.
4. Posizionare la rampa chiusa in modo che il bordo contrassegnato con la scritta "TOP" sia completamente sul livello superiore e la cerniera sia al centro del percorso scelto (vedere figura 2).
5. Aprire completamente la rampa (vedi foto 3).
6. Prima dell'uso, verificare che entrambe le estremità della rampa siano stabili e livellate in tutta la sua larghezza.
7. Assicurarsi che le rampe non si spostino durante l'uso. Verificare che la rampa sia ben fissata e stabile ogni volta che viene utilizzata.



Foto 1



Foto 2



Foto 3

MANUTENZIONE

- Le rampe devono essere conservate in un luogo pulito e asciutto
- Se le rampe dovessero danneggiarsi o diventare scivolose in qualche modo, non dovrebbero essere utilizzate
- Le rampe possono essere pulite con normali prodotti per la pulizia e lasciate asciugare prima dell'uso.
- Temperatura massima di pulizia consigliata 50°C; per maggiori dettagli sull'uso con macchine per la pulizia industriale, si prega di chiedere informazioni.
- Per lo smaltimento di questo prodotto, contattare un'impresa di riciclaggio dei metalli



Celebrating over
20 YEARS
of better access
for better living



RAMPA PIEGHEVOLE PER SEDIA A ROTELLE

ISTRUZIONI PER L'USO

®


Codici prodotto: MFR06, MFR09, MFR12, MFR15, MFR18, MFR21, MFR24

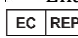
GARANZIA

- Le rampe sono coperte da una garanzia completa di 12 mesi per un utilizzo normale, si applicano le relative condizioni.
- Un utilizzo diverso da quello pubblicato/previsto invaliderà la garanzia.
- Le rampe non sono progettate per un uso esterno permanente e non devono essere fissate.
- Qualsiasi modifica/riparazione non effettuata dal produttore invaliderà la garanzia.



Metro Mobility è un marchio registrato di Enable Access, LU7 4UH. Adottiamo una politica di revisione e ricerca continua, che potrebbe comportare modifiche all'aspetto e alle specifiche del prodotto. Data di emissione: 15 agosto 2022

 Enable Access, Unit R, Cherrycourt Way, Leighton Buzzard, LU7 4UH, Regno Unito.

 Enable Access Global Ltd, 27 Phibsboro Place, Dublino 7, D07 V20, Repubblica d'Irlanda

Per supporto tecnico o dettagli sul rivenditore più vicino chiamare 004420 8275