

# RAMPE PLIANTE POUR FAUTEUIL ROULANT

## MODE D'EMPLOI

®

**Codes produits :** MFR06, MFR09, MFR12, MFR15, MFR18, MFR21, MFR24

**OBJECTIF PRÉVU :** Ces rampes sont destinées à être utilisées comme accessoire de fauteuil roulant pour les personnes handicapées afin de naviguer dans des zones de différentes hauteurs.

### AVANT UTILISATION

- Retirez tout l'emballage et assurez-vous que les rampes n'ont pas été endommagées pendant le transport. Conservez l'emballage.
- Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant d'utiliser les rampes
- Conservez les instructions pour référence
- Sur chaque rampe, vous trouverez une étiquette indiquant la charge maximale autorisée pour la rampe.

### DÉPLOYER

1. Portez la rampe en utilisant la poignée située sur le trottoir central (voir photo 1).
2. Assurez-vous que le sol/la surface, tant au niveau supérieur qu'au niveau inférieur, est ferme et stable.
3. Vérifiez que la rampe est suffisamment longue pour couvrir la marche/montée.
4. Placez la rampe fermée en position avec la lèvre marquée « TOP » entièrement sur le niveau supérieur et la charnière centrale par rapport à l'itinéraire choisi (voir photo 2).
5. Ouvrez complètement la rampe (voir photo 3).
6. Vérifiez que les deux extrémités de la rampe sont stables et de niveau sur toute la largeur avant utilisation.
7. Assurez-vous que les rampes ne se déplacent pas pendant l'utilisation. Vérifiez qu'elles sont bien fixées et stables à chaque utilisation.



Photo 1



Photo 2




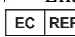
Photo 3

### ENTRETIEN

- Les rampes doivent être stockées dans un endroit propre et sec
- Si les rampes sont endommagées ou glissantes de quelque façon que ce soit, elles ne doivent pas être utilisées
- Les rampes peuvent être nettoyées avec des produits de nettoyage normaux et laissées sécher avant utilisation.

Metro Mobility est une marque déposée d'Enable Access, LU7 4UH. Nous menons une politique d'analyse et de recherche continue, susceptible d'entraîner des modifications de l'apparence et des spécifications de nos produits. Date de publication : 15 août 2022

 Enable Access, Unité R, Cherrycourt Way, Leighton Buzzard, LU7 4UH, Royaume-Uni.

 Enable Access Global Ltd, 27 Phibsboro Place, Dublin 7, D07 V20, République d'Irlande

**Pour obtenir une assistance technique ou des informations sur votre revendeur le plus proche, veuillez appeler 004420 8275 0375**





Celebrating over  
**20 YEARS**  
of better access  
for better living



# RAMPE PLIANTE POUR FAUTEUIL ROULANT

## MODE D'EMPLOI

®

**Codes produits :** MFR06, MFR09, MFR12, MFR15, MFR18, MFR21, MFR24

- Température de nettoyage maximale recommandée 50°C ; veuillez nous contacter pour plus de détails sur l'utilisation avec des machines de nettoyage industrielles
- Pour l'élimination de ce produit, veuillez contacter un entrepreneur spécialisé dans le recyclage des métaux.

### GARANTIE

- Les rampes bénéficient d'une garantie complète de 12 mois pour une utilisation normale, des conditions s'appliquent.
- Toute utilisation autre que celle publiée/prévue annulera la garantie.
- Les rampes ne sont pas conçues pour une utilisation extérieure permanente et ne doivent pas être fixées.
- Toute modification/réparation autre que celle effectuée par le fabricant annulera la garantie.

Metro Mobility est une marque déposée d'Enable Access, LU7 4UH. Nous menons une politique d'analyse et de recherche continue, susceptible d'entraîner des modifications de l'apparence et des spécifications de nos produits. Date de publication : 15 août 2022



Enable Access, Unité R, Cherrycourt Way, Leighton Buzzard, LU7 4UH, Royaume-Uni.

EC REP Enable Access Global Ltd, 27 Phibsboro Place, Dublin 7, D07 V20, République d'Irlande

**Pour obtenir une assistance technique ou des informations sur votre revendeur le plus proche, veuillez appeler 004420 8275 0375**

