



VELA Medical

Numéro de manuel 106032

Item no.: Model

8026 VELA Salsa 110

8027 VELA Salsa 120

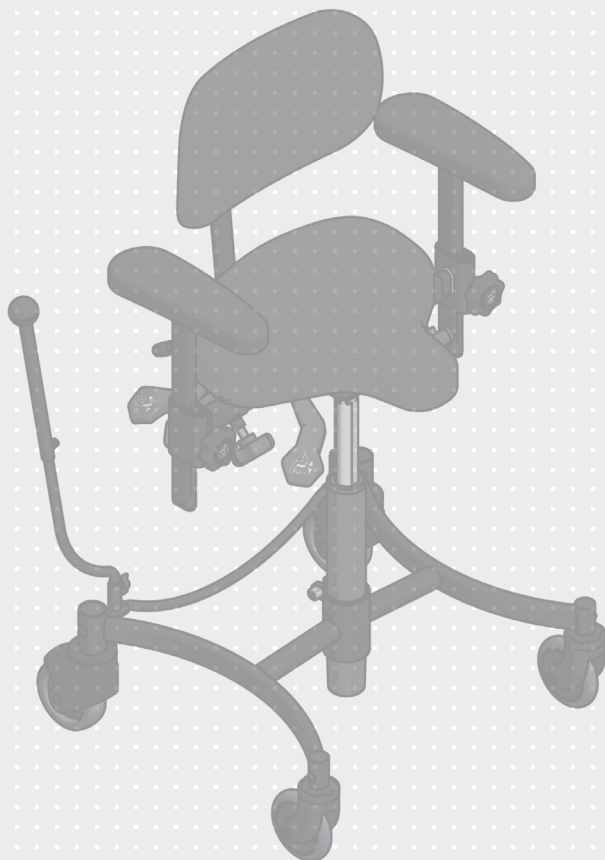
*Le design de la chaise varie en fonction du modèle*

TABLE DES MATIÈRES

1.0. INTRODUCTION	3
1.1. SÉCURITÉ	4
1.1.1. Usage	4
1.1.2. Transport	4
1.2. GARANTIE	4
1.3. DÉPAQUETER LE FAUTEUIL	5
1.4. ENTRETIEN	5
1.4.1. Roues	5
1.4.3. Rembourrage	5
1.5. TRAITEMENT DU PRODUIT EN FIN DE VIE	5
1.6. MANUEL D'UTILISATION	6
1.6.1. Montage du Dossier	6
1.6.2. Réglage de la hauteur du siège	6
1.6.3. Réglage de l'inclinaison du siège	6
1.6.4. Frein	6
1.6.5. Réglage de la hauteur du dossier	7
1.6.6. Réglage de l'inclinaison du dossier	7
1.6.7. Réglage de l'accoudoir, la hauteur	7
1.6.8. Réglage de l'accoudoir, l'épaisseur	7
1.6.9. Rotation*	8

1.0. INTRODUCTION

CHER(E) CLIENT(E)

Nous vous remercions d'avoir acheté un VELA Medical fauteuil. Ce manuel d'utilisation contient les informations utiles concernant la mise en position, le mode d'emploi et l'entretien.

Important

Veuillez lire ce manuel attentivement et le sauvegarder pour une utilisation ultérieure. Ce manuel est un accompagnement obligatoire du fauteuil. Vous trouverez également le manuel d'utilisation sur le site web de VELA : www.vela-medical.com. Sur le site, vous trouverez aussi d'autres informations pertinentes sur les fauteuils.

N'hésitez pas de contacter le distributeur de VELA Medical de votre pays, si vous avez des questions.

VELA Medical se réserve le droit de modifier ce manuel.

VELA Medical

Gøteborgvej 8-12
DK-9200 Aalborg SV
Denmark
www.vela-medical.com

GÉNÉRAL

1.1. SÉCURITÉ

Ce fauteuil qui porte le marquage « CE » et approuvé sous le nom "VELA Salsa" est conforme aux lois à la législation de l'UE en vigueur en la matière. Le fauteuil est fabriqué par VELA Medical , Vermund Larsen A/S, Goeteborgvej 8-12, 9200 Aalborg SV, Denmark.

1.1.1. USAGE

Cette fauteuil est un fauteuil d'intérieur conçu pour personnes assises.

- :: Le fauteuil n'est pas fabriqué pour être monté dessus.
- :: Les freins du fauteuil doivent toujours être activés lorsqu'une personne s'assied ou se lève du fauteuil.

Cette fauteuil sont testés et approuvés pour un poid maximum de 125 kg.

1.1.2. TRANSPORT

Activez le frein du fauteuil lors d'un transport par voiture, par avion ou tout autre moyen de transport. Le fauteuil n'est pas approuvé comme siège de passager dans les moyens de transport et ne doit jamais être utilisé comme tel.

Le fauteuil supporte les spécifications de transport suivantes :

Température : -40°C (-40°F) à +70°C (+158°F).
Humidité : 15-95%.

Pression atmosphérique: PPP jusqu'à 1000 metres (3280 ft) au dessus la surface de la mer

1.2. GARANTIE

VELA Medical accorde sur ses produits une garantie selon les lois et la réglementation qui sont en vigueur dans le pays où le fauteuil a été acheté. La garantie est applicable uniquement quand les pièces de rechange et l'accessoire d'origine sont utilisés. Toute modification du fauteuil doit être faite par un technicien de service autorisé.

VELA Medical n'assume pas la responsabilité des dégâts ou des dommages qui sont survenus à cause :

- :: Du transport
- :: Du mauvais usage
- :: De l'usure
- :: D'un usage non correcte
- :: D'une utilisation des pièces de rechange ou d'accessoires qui ne sont pas ceux d'origine
- :: Des modifications faites par des techniciens de service non-autorisés

1.3. DÉPAQUETER LE FAUTEUIL

Cette fauteuil est fourni dans un emballage de carton, développé avec soin et considération pour l'environnement.

S'il y a des pièces manquantes ou de dégâts à lors du transport du fauteuil, veuillez contacter votre distributeur immédiatement. N'essayez pas de réparer le fauteuil vous-même ou de l'utiliser.

Contenu de l'emballage en carton :

:: Fauteuil VELA Medical

:: Manuel d'utilisation

Note: voir le paragraphe 1.6.1. pour un montage correct du dossier

1.4. ENTRETIEN

Nous recommandons un service de réglage annuel de votre fauteuil pour repérer, par exemple, des parties usées ou défectueuses. L'utilisateur doit resserrer régulièrement toutes les pièces amovibles.

1.4.1. ROUES

Nous recommandons que les roues soient contrôlées à intervalles réguliers pour enlever des restes de tissu par exemple.

1.4.2. ARMATURE

Lavez à l'eau, si possible avec un savon à l'acide neutre.

1.4.3. REMBOURRAGE

Stof: Nettoyez avec un produit pour le nettoyage des meubles rembourrés ou essuyez le siège avec un chiffon rincé à l'eau pure et bien essoré.

Le similicuir : Nettoyez à l'eau ou avec un savon doux.

Textiles médicaux : Nettoyez comme décrit ci-dessus. Les textiles médicaux peuvent également être nettoyés avec un désinfectant et de l'alcool. Pour savoir quelles concentrations spécifiques les différents types de rembourrage peuvent supporter, consultez www.vela-medical.com

1.5. TRAITEMENT DU PRODUIT EN FIN DE VIE

Ce produit contient des matériaux recyclables notamment du plastique, de métal, etc. Par conséquent, lorsque ce produit est en fin de vie, son traitement doit être effectué conformément à la législation locale et séparément des ordures ménagères. Le traitement et le recyclage de ce produit doivent impérativement être effectués de manière optimale afin d'empêcher ce dernier d'affecter négativement l'environnement et les populations.

1.6. MANUEL D'UTILISATION

Le vérin à gaz doit uniquement être remplacé par l'équipe de service de votre distributeur ou une personne compétente.

1.6.1. MONTAGE DU DOSSIER

Placer le levier de réglage du dossier (1) en position ouverte. Appuyer sur les ressorts de compression (2) et faire passer la barre du dossier à travers l'ouverture. Replacer ensuite le levier. **Remarque :** il faut faire passer la barre du dossier par l'ouverture de manière à ce que le ressort de compression s'encliquette. Assurez-vous que le dossier ne se déplace pas !




1.6.2. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

Poussez le levier situé à main droite pour régler la hauteur du siège



1.6.3. RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU SIÈGE


Poussez le levier situé au milieu pour régler l'inclinaison du siège.

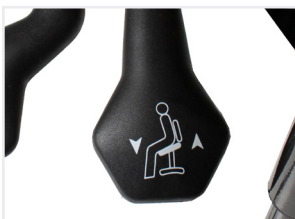

1.6.4. FREIN

Poussez le levier sur le côté en avant pour freiner le VELA Salsa. Pour débloquer le fauteuil retournez le levier dans sa position verticale.

Note : Desserrez la vis située en bas du levier du frein pour déplacer le frein, enlevez le bouton en plastique situé dans le trou opposé et insérez le levier du frein. N'oubliez pas de resserrer la vis après.

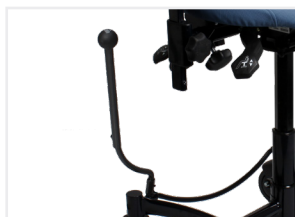



1.6.5. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU DOSSIER

Utilisez le levier situé derrière le dossier pour régler l'inclinaison du dossier. N'oubliez pas de serrer la poignée après l'avoir ajustée.



1.6.6. RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU DOSSIER

Poussez le levier arrière à droite pour régler l'inclinaison du dossier.



1.6.7. RÉGLAGE DE L'ACCOUDOIR, LA HAUTEUR

Desserrez la vis sur la barre de l'accoudoir pour régler la hauteur de l'accoudoir. N'oubliez pas de resserrer la vis après.



1.6.8. RÉGLAGE DE L'ACCOUDOIR, L'ÉPAISSEUR

Desserrez la vis situé sous le siège pour régler l'épaisseur de l'accoudoir. N'oubliez pas de resserrer la vis après.



1.6.9. ROTATION*

La rotation du siège se fait en tirant sur le levier situé devant à gauche.

** Dépendant du modèle*