


Beschreibung:

Materialien:

- Struktur: Epoxy-Beschichtung Stahl
- Tibiastütze: Polyurethan

Abmessungen (mm)

- Höhe x Tiefe x Breite : 1475 x 935 x 540
- Anti-Kipp-System:
 - . Gesamtbreite: 340
 - . Nutzbreite: 275
- Patientengriff:
 - . Höhe: 900 à 1245 – breite : 540
- Griffe für die Pflegekraft:
 - . Höhe: 1130 à 1475 – breite : 540
- Tibiastütze:
 - . Polyurethan stütze: 210x165x70
 - . Höhe der Basis zur Schwenkachse: 285 à 415
 - . Achsabstand der Stütze: 230 (300)
- BasisHöhe: 75 mm

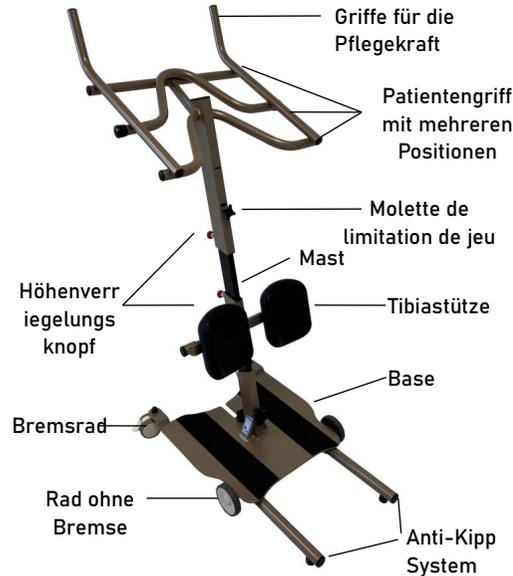Gewicht: 19 kg

Recommandations :

Reinigung:

- . Wischen Sie alle Oberflächen des Vertic Home mit einem Vliesstoff ab, der mit einer geeigneten Reinigungslösung (Anios Desinfektionsmittel für hohe Oberflächen oder ein anderes gleichwertiges Produkt) getränkt ist.
- . Folgende Mittel niemals verwenden: reiner Alkohol, Azeton, Perchlorethylene und Trichlorethylene, Lösungsmittel oder Reinigungspulver, Scheuermittel, jegliche Art von Wachs .
- . Reinigen Sie das Vertic Home nicht mit viel Wasser oder einem Hochdruckstrahl.

Lagerung:

- Das Produkt muss staub- und feuchtigkeitsgeschützt an einem trockenen und gemäßigten Ort gelagert werden:
- . Lager und Transporttemperatur: -10°C bis +50°C . Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % ohne kondensierend
- Wenn Sie Ihr Produkt für einen längeren Zeitraum lagern müssen, reinigen Sie es und decken Sie es vor der Lagerung ab.

Garantie :

- . Die vertragliche Garantiezeit für dieses Produkt ist auf 2 Jahre begrenzt und deckt nur Herstellungsfehler ab.
- . Ausfälle, die auf eine anormale Verwendung oder eine Verwendung entgegen den Spezifikationen und Vorsichtsmaßnahmen zurückzuführen sind, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Vorbeugende Wartung:

Es ist ratsam, eine jährliche Inspektion durchzuführen, um die Leistung des Vertic Home zu erhalten.

Je nach Nutzungshäufigkeit prüfen Sie folgende Punkte:

- . Bedienung der Höhenverstellung und Arretierung der Griffe und der Tibiastütze.
- . Bedienung der Bremsen und Räder.
- . Befestigung des Mastes am Base.

Sauberkeit, allgemeiner Zustand der Epoxidbeschichtung.

- . Überprüfen Sie den Verschleißzustand der Anti-Rutsch-Pads und das Gleiten der Kippstütze.



VERTIC HOME

GEBRAUCHSANWEISUNG



MAX
Gewicht
135 kg



Code GTIN



36158000538964

VERTIC HOME
BRONZE/NOIR 9005

Montage :



Befestigen Sie den Mast mit der Schraube TH 8x65 an der Basis, Einstelllöcher auf der Bremsradseite, und ziehen Sie das D60 M8 Trigo-Rad fest an. Die Tibiastütze bis zu den unteren Verstelllöchern einführen. Anschließend den Griff.

Merkmale:




a/ Höhenverstellung der Patienten- und Pflegergriffe:

. Ziehen Sie den Feststellknopf und stellen Sie die Griffe auf die gewünschte Höhe ein.

. Befestigen Sie den Feststellknopf an einem der 10 Einstelllöcher.


. Ziehen Sie den Knopf fest, um das Spiel im Griff zu begrenzen.

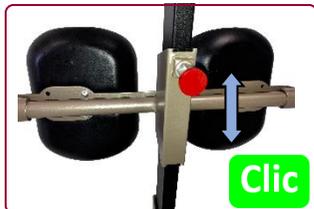

b/ Höhenverstellung der Tibiastütze:

. Den Feststellknopf ziehen und die Tibiastütze in der gewünschten Höhe (unter der Kniescheibe des Patienten) positionieren.

. Befestigen Sie den Feststellknopf an einem der 6 Einstelllöcher.

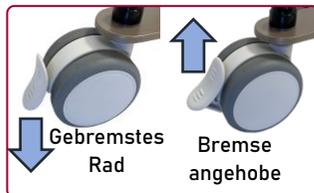


c/ Bremsen:

Das Vertic Home ist mit 2 gebremsten Rollen ausgestattet.

Die Räder werden durch Drücken der Bremse zwischen den beiden Rollen blockiert.

Um die Räder zu entriegeln, lösen Sie die Bremse.

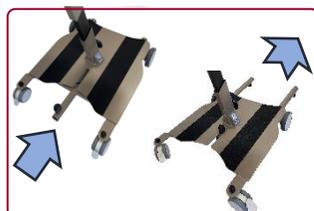

d/ Stabilisierende Krücke (Anti-Kipp-System):

Um den Patienten zu transferieren, ist es wichtig, die stabilisierende Krücke zu entfernen. Drücken Sie dazu mit dem Fuß die schwarze Spitze auf der Platte bis zum Anschlag nach oben. Der Patient kann dann selbstständig aufstehen und Sie können ihn bewegen.

WICHTIG: Bewegen Sie den Patienten niemals, wenn die Stabilisierungsgehstütze eingefahren oder auch nur teilweise ausgefahren ist.

Verwenden des Vertic Home :



1/ Positionieren Sie das Vertic Home in der Nähe des Patienten, sodass dieser seine Füße auf die Plattform stellen kann.

2/ Passen Sie die Höhe der Tibiastütze an.

3/ Entfernen Sie die Krücke, indem Sie das schwarze Endstück bis zum Anschlag hineindrücken.

4/ Blockieren Sie die Bremsen an jedem Rad.

5/ Stellen Sie den Griff so ein, dass sich die unteren Griffe auf Schulterhöhe der anzuhebenden Person befinden.

6/ Bitten Sie den Patienten, die unteren Griffe zu ergreifen, um aufzustehen. Unterstützen Sie den Patienten bei Bedarf während der Vertikalierungsphase und achten Sie dabei auf die seitliche Stabilisierung des Geräts.

7/ Legen Sie den Gurt bei Bedarf am Becken des Patienten an (Option).



8/ Lösen Sie die Bremsen.

9/ Fassen Sie die oberen Griffe und bewegen Sie das Vertic Home, um den Patienten an die gewünschte Stelle zu bringen.



WICHTIG: Die Bodenfreiheit des Vertic Home wurde bewusst reduziert: Stellen Sie sicher, dass kein Hindernis auf dem Boden (Schwelle, Gegenstand, schiefe Ebene usw.) den Patiententransfer behindert oder aus dem Gleichgewicht bringt.

10/ Blockieren Sie die Räder und bitten Sie den Patienten, sich hinzusetzen.

11/ Sobald der Patient richtig installiert ist, entfernen Sie Vertic Home und ziehen Sie dann den Ständer ein, um das Gerät zu verstauen.

WICHTIG: Achten Sie während der gesamten Transferphase darauf, dass die Stabilisierungsstütze immer ausgefahren ist und halten Sie Sichtkontakt zum Patienten.



SICHERHEITSHINWEISE:

. Das Vertic Home ist für den Transfer konzipiert, indem es den Patienten vertikal stellt und aus einer sitzenden Position in eine andere schwenkt (vom Bett zum Sessel - vom Ruhesessel zum Rollstuhl usw.).

. Verwenden Sie dieses Gerät niemals alleine. Der Transfer kann nur in Anwesenheit einer dritten Person durchgeführt werden, die das Vertic Home während der gesamten Transferphase stabilisiert und wartet.

. Überschreiten Sie nicht das auf dem Vertic Home angegebene maximale Benutzergewicht von 135 kg.

. Verwenden Sie Vertic Home immer auf einer ebenen Fläche.