

Descrizione :


Materiali:

- Struttura: acciaio verniciato epossidico
- Supporto tibiale: poliuretano

Dimensioni (mm)

- AxLxl : 1475 x 935 x 540
- Dispositivo antiribaltamento:
 - . Larghezza esterna: 340
 - . Larghezza utile : 275
- Maniglie del paziente:
 - . Altezza: 900 à 1245 – Larghezza: 540
- maniglie infermieristiche:
 - . Altezza: 1130 à 1475 – Larghezza: 540
- Supporto tibiale:
 - . Supporto: 210x165x70
 - . Altezza base / asse di rotazione: 285 à 415
 - . interasse tra i supporti: 230 (config. 300)
- Altezza base : 75 mm

Peso : 19 kg

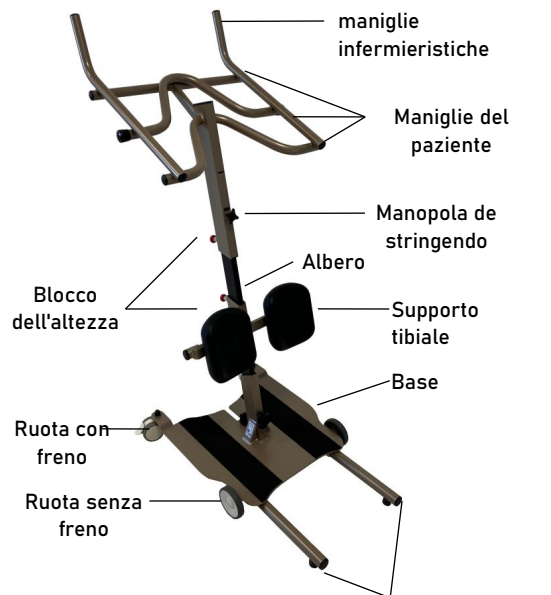

Dispositivo antiribaltamento

Raccomandazioni :

Pulizia :

- . Pulire tutte le superfici con un panno impregnato con una soluzione pulente idonea (ANIOS DETERGENTE DISINFETTANTE PER SUPERFICI ALTE o altro prodotto equivalente).
- . Evitare assolutamente : alcol puro, Acetone, Percloroetilene e tricloroetilene, solventi o detergenti, prodotti di pulizia abrasivi, tutti i tipi di cera.
- . Non pulire Vertic Home con abbondante acqua o getto a pressione.

Stoccaggio:

Il prodotto deve essere conservato al riparo dalla polvere e dall'umidità, in un luogo asciutto e temperato: T° di stoccaggio e trasporto: -10°C à +50°C . Umidità relativa: 20% à 80% senza condensa. Se devi conservare il prodotto per un lungo periodo, puliscilo e poi coprillo prima di riportarlo.

Garanzia:

- . Il periodo di garanzia contrattuale per questo prodotto è limitato a 2 anni e copre solo i difetti di fabbricazione.
- . Eventuali guasti derivanti da un utilizzo anomalo o contrario alle specifiche e alle precauzioni d'uso non sono coperti da garanzia.

Manutenzione preventiva:

Per mantenere le prestazioni della Vertic Home è consigliabile effettuare un'ispezione annuale.

A seconda della frequenza di utilizzo, controllare i seguenti punti:

- . Funzionamento della regolazione in altezza e del bloccaggio delle maniglie e del supporto tibiale.
- . Funzionamento dei freni e delle ruote.
- . Fissaggio dell'albero alla base.
- . Pulizia, condizioni generali della vernice epossidica.
- . Controllo dello stato di usura dei tamponi antiscivolo e dello scorrimento del dispositivo antiribaltamento.

DISPOSITIVO DI
TRASFERIMENTOVERTIC
HOME

ISTRUZIONI

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical



PESO MASSIMO
135 kg




Code GTIN



36158000538964


VERTIC HOME
BRONZE/NOIR 9005

Montaggio :

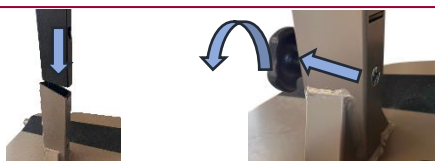


Fissare l'albero sulla base, fori di regolazione sul lato ruota freno, con la vite TH 8x65 e stringendo saldamente la ruota trigo D60 M8. Inserire il Supporto tibiale fino ai fori di regolazione inferiori. Inserire la maniglia.

Funzioni:

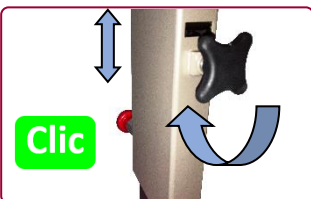


a/ Regolazione dell'altezza delle maniglie:

Tirare la manopola di bloccaggio e regolare le maniglie all'altezza desiderata.
 . Bloccare la manopola di bloccaggio su uno dei 10 fori di regolazione.
 . Stringere la manopola.

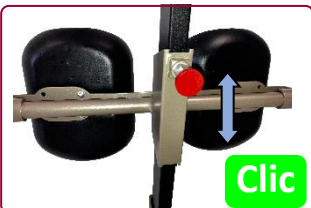


b/ Regolazione dell'altezza del supporto tibiale:

. Tirare la manopola di bloccaggio e posizionare il supporto tibiale all'altezza desiderata (sotto la rotula del paziente).
 . Bloccare la manopola di bloccaggio su uno dei 6 fori di regolazione.

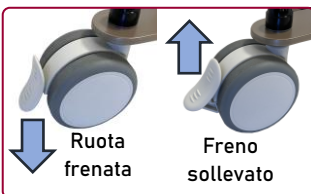

c/ Freni :

Il Vertic Home è dotata di 2 ruote girevoli con freno.
 Le ruote si bloccano premendo il freno situato tra i due rulli.
 Al contrario, per sbloccare le ruote, sollevare il freno.

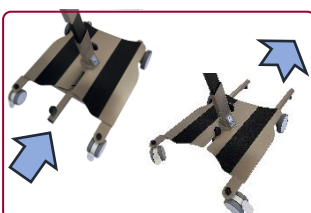

d/ Dispositivo antiribaltamento:

Per trasferire il paziente è indispensabile rimuovere la stampella stabilizzatrice. Per fare ciò, spingere con il piede la punta nera sulla piastra finché non si ferma.
 Il paziente può quindi alzarsi da solo e tu puoi spostarlo.

IMPORTANTE: Non spostare mai il paziente se la stampella stabilizzatrice è retratta o anche solo

Uso del Vertic Home :



- 1/ Posizionare il Vertic Home vicino al paziente in modo che appoggi i piedi sulla piattaforma.
- 2/ Regolare il supporto tibiale.
- 3/ Rimuovere la stampella stabilizzatrice spingendo il terminale nero fino in fondo.
- 4/ Bloccare il freno su ogni ruota.

5/ Regolare la maniglia in modo che le maniglie inferiori siano all'altezza delle spalle della persona da sollevare.

6/ Chiedere al paziente di afferrare le maniglie inferiori per alzarsi. Se necessario, assistere il paziente durante la fase di verticalizzazione, assicurandosi che il dispositivo sia stabilizzato lateralmente.

7/ Se necessario, posizionare la cinghia sul bacino del paziente (facoltativo).



8/ Sbloccare i freni.


9/ Afferrare le maniglie superiori e muovere il Vertic Home per trasferire il paziente nella posizione desiderata.

IMPORTANTE: l'altezza da terra del Vertic Home è stata volutamente ridotta: assicurarsi che nessun ostacolo sul terreno (soglia, oggetto, piano inclinato, ecc.) ostacoli o sbilanci il trasferimento del paziente.

10/ Bloccare le ruote e chiedere al paziente di sedersi.

11/ Una volta che il paziente è installato correttamente, rimuovere il Vertic Home e quindi ritrarre la stampella per riporre il dispositivo.

IMPORTANTE: urante la fase di trasferimento, assicurarsi che la stampella stabilizzatrice sia sempre fuori e mantenere il contatto visivo con il paziente.

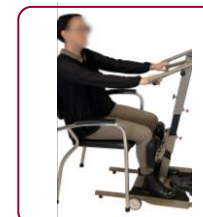

SICUREZZA - AVVERTENZE

. Vertic Home è progettato per eseguire un trasferimento verticalizzando e ruotando il paziente da una posizione seduta a un'altra (dal letto alla poltrona, dalla sedia da riposo alla sedia a rotelle, ecc.).

. Non utilizzare mai questo dispositivo da soli. Il trasferimento può essere effettuato solo in presenza di una terza persona che stabilizzi e tenga fermo il Vertic Home durante la fase di trasferimento.

. Non superare il peso massimo dell'utente di 135 kg indicato sul Vertic Home.

. Utilizzare sempre la Vertic Home su una superficie piana.