

REF

8170 4060


etac®

Ryggstöd Relax duschsits

Backrest Relax shower seat

Rückenlehne für Duschklappensitz Relax

Rugleuning Relax douchezitting

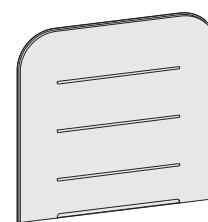

x1

1a11939.3 2023-03-20

1


sv Rengör underlaget där ryggstödet ska sitta från fett, damm, smuts och fukt.

en Clean off any grease, dust, dirt and moisture from the surface where the backrest is to be fitted.

de Säubern Sie den Bereich, wo die Rückenlehne angebracht werden soll, von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Fett.

nl Verwijder vet, stof, vuil en vocht van het oppervlak waar de rugleuning moet worden gemonteerd.

2

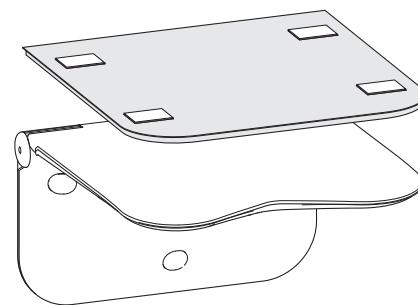

3

sv Optimal vidhäftning erhåller man när limytan resp. underlaget har en temperatur av minst 20 °C. Dessutom är det viktigt att man använder hårt tryck vid appliceringen

en Best adhesion is obtained when the glue area and the fitting surface have a temperature of at least 20 °C. It is also important to apply large pressure when fitting the backrest.

de Die beste Haftkraft erzielen Sie, wenn Klebefläche und das zu befestigende Teil eine Mindesttemperatur von 20 °C haben. Es ist des Weiteren wichtig, beim Anbringen der Rückenlehne starken Druck auf die Klebeflächen auszuüben.

nl Het te lijmen gebied en het montageoppervlak moeten voor de beste hechting een temperatuur van minimaal 20 °C hebben. Het is ook belangrijk om grote druk uit te oefenen bij het monteren van de rugleuning.

4

sv Eftersom limmet behöver tid att fästa ordentligt i underlaget, skall belastning av ryggstödet ske tidigast efter 60 minuter.

en As the glue requires time to stick properly to the surface, it is not permitted to put any loads on the backrest until 60 minutes have elapsed.

de Der Kleber haftet erst nach einer gewissen Zeit voll an der Oberfläche, daher dürfen Sie die Rückenlehne erst nach 60 Minuten beladen.

nl De lijm heeft tijd nodig om aan het oppervlak te hechten; daarom mag er pas 60 minuten na het aanbrengen van de lijm belasting op de rugleuning worden geplaatst.

5



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com