

## NEW Aerolight-Lifestyle

# Istruzioni per l'uso

Codici dei prodotti: AL18, AL21, AL24, AL27, AL28

**Scopo previsto:** Queste rampe sono destinate ad essere utilizzate come accessorio per sedie a rotelle per le persone con disabilità per navigare in aree di diverse altezze.

### Before use

- Rimuovi tutto l'imballaggio e assicurati che le rampe non siano state danneggiate durante il trasporto. Conserva l'imballaggio.
- Leggi attentamente le istruzioni e gli avvisi prima di usare le rampe.
- Conserva le istruzioni per consultarle.
- In ogni rampa troverai un'etichetta che indica il carico massimo permesso per la rampa.

### Uso

1. Trasporta la rampa, usando entrambi i manici simultaneamente. (pic. A).
2. Assicurati che la superficie sia stabile e rigida sia nel livello superiore che nel livello inferiore.
3. Controlla che la rampa sia abbastanza lunga da coprire il gradino. Le rampe sono progettate per essere usate con un'inclinazione tra 1:4 e 1:20 (che dipende da un uso sicuro e dalle esigenze d'utilizzo).
4. Apri la metà della rampa.
5. Mettila in posizione con il bordo completamente sul livello superiore, e il gancio laterale centrale alla tratta selezionata (pic. B). Il design unico delle estremità mantiene la rampa in posizione.
6. Apri l'altra metà della rampa.
7. Posala vicino alla prima rampa, e accostale assicurandoti che i ganci interni siano totalmente posizionati (pic. C & D).
8. Assicurati che le rampe non si stacchino in funzione. Controlla che la rampa sia fermamente posizionata ad ogni uso.
9. Per lo stoccaggio prendere le rampe e richiuderle una alla volta. Per lo stoccaggio ultraleggero le rampe possono essere incastrate.


Nota importante: L'uso consigliato per le rampe di accesso alla sedia a rotelle NEW Aerolight- Lifestyle è per sedie a rotelle e scooter.

### Manutenzione

- Se la rampa si danneggia / diventa scivolosa non deve essere utilizzata (contatta il fornitore)
- Le rampe possono essere pulite con normali prodotti detergenti e lasciate ad asciugare prima dell'uso.
- Temperatura massima di pulizia raccomandata 50°C; si prega di informarsi per ulteriori riguardanti la pulizia con macchine industriali.
- Se non hai più bisogno di questo prodotto si prega di contattare un'impresa di riciclaggio dei metalli.

### Garanzia

- Le rampe NEW Aerolight sono progettate e ottimizzate per disabilità/uso della mobilità
- Le rampe hanno una garanzia di 2 anni per il normale utilizzo, si applicano le condizioni.
- L'uso diverso da quello pubblicato/previsto annullerà la garanzia.
- Le rampe non sono progettate per un permanente uso all'esterno e non devono essere fissate.
- Qualsiasi modifica/riparazione diversa dal produttore annullerà la garanzia.
- Le rampe non saranno riparate/sostituite se la targhetta del numero di serie è stata rimossa/sostituita.

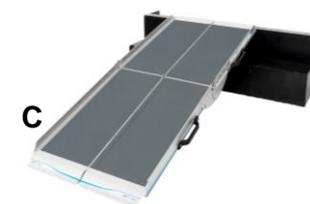

## NEW Aerolight-Lifestyle

# Istruzioni per l'uso

Codici dei prodotti: AL18, AL21, AL24, AL27, AL28

### Accessori disponibili (contattare il fornitore/produttore per ordinare)

- Cono segnaletico AWC
  - Kit cinghia da muro AWK
- Altri prodotti disponibili includono piattaforme leggere, platforms, sostegni che aderiscono alle rampe e kit corrimano.

**Codice / Lunghezza / Larghezza rampa / Larghezza estremità/ Capacità / Peso / Dimensioni immagazzinato**

Code	Length	Ramp Width*	Lip Width	Capacity	Weight (Each Half)	Stored Dimensions L x W x D
AL18	180cm (6')	74cm (29")	69.6cm (27.4")	350kg (55st)	7.4kg (16lbs)	95 x 37 x 25cm (37 x 15 x 10")
AL21	210cm (7')	74cm (29")	69.6cm (27.4")	300kg (47st)	8.3kg (18lbs)	110 x 37 x 25cm (43 x 15 x 10")
AL24	240cm (8')	74cm (29")	69.6cm (27.4")	250kg (39st)	9.3kg (21lbs)	125 x 37 x 25cm (49 x 15 x 10")
AL27	270cm (9')	74cm (29")	69.6cm (27.4")	250kg (39st)	10.3kg (23lbs)	140 x 37 x 25cm (55 x 15 x 10")

\* Width excludes handles

## Inclinazione


### 2 Quanto è ripido?

- 1:6 (10')** Accettabile in alcuni casi per l'accesso assistito e sedie a rotelle elettriche
- 1:8 (8')** Un buon equilibrio tra inclinazione e uso dello spazio, adatto per eventi ecc.
- 1:12 (5')** Spesso richiesto dai servizi sociali/autorità locali. Requisiti minimi Building Regs Doc M per rampe installate
- 1:15 (4')** Talvolta richiesto dai servizi sociali/autorità locali per accesso indipendente

Ricorda: "Più lunga è la rampa, più facile è la discesa"

## 3 Lunghezza

- a. Misura l'altezza del gradino/differenza di livello  
(l'altezza tot. dei gradini o altezza al punto di riposo del veicolo)

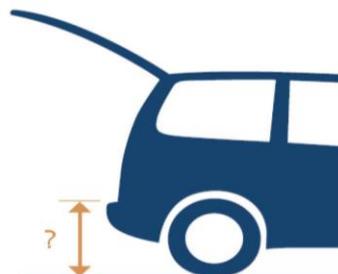

- b. Usa la Guida Lunghezza Rampata per stabilire la lunghezza di cui hai bisogno

### Guida Lunghezza Rampata

Altezza gradino / differenza di livello (fino a)	Lunghezza a 1:6	Lunghezza a 1:8	Lunghezza a 1:16
10cm (4")	60cm (2')	80cm (2' 7")	120cm (3' 11")
15cm (6")	90cm (2' 11")	120cm (3' 11")	180cm (5' 11")
20cm (8")	120cm (3' 11")	160cm (5' 3")	240cm (7' 10")
25cm (10")	150cm (4' 11")	200cm (6' 7")	300cm (9' 10")
30cm (1')	180cm (5' 11")	240cm (7' 10")	360cm (11' 10")
45cm (1' 6")	270cm (8' 10")	360cm (11' 10")	540cm (17' 9")
60cm (2')	360cm (11' 10")	480cm (15' 9")	720cm (23' 7")



*Celebrating over*  
**20 YEARS**  
*of better access  
for better living*



**NEW Aerolight-Lifestyle**

## Istruzioni per l'uso

**Codici dei prodotti:** AL18, AL21, AL24, AL27, AL28



RampCentre is a registered trademark of Enable Access, LU7 4UH. We undertake a policy of continual review and research, which may lead to changes in product appearance and specification. Date of Issue: 15 August 2022

 Enable Access, Unit R, Cherrycourt Way, Leighton Buzzard, LU7 4UH, UK.

 Enable Access Global Ltd, 27 Phibsboro Place, Dublin 7, D07 V20, Republic of Ireland

**For technical support or details on your nearest stockist please call 020 8275 0375**