



Celebrating over
20 YEARS
of better access
for better living

Enable Access

doorline-multi™

Istruzioni per l'uso

Codici dei prodotti: DM5, DM7



Scopo previsto: Queste rampe sono destinate ad essere utilizzate come accessorio per sedie a rotelle per le persone con disabilità per navigare in aree di diverse altezze.

Prima dell'uso

- Rimuovi e conserva l'imballaggio.
- assicurati che le rampe non siano state danneggiate durante il trasporto e lo stoccaggio.
- Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare le rampe. Conservare le istruzioni come riferimento.
- Assicurarsi che la superficie sia solida, stabile e in grado di sopportare il carico previsto.
- La portata della rampa è di 300 kg (661 libbre), supponendo che la rampa poggi sulla soglia.

Nota: la maniglia può essere spostata dall'altro lato della rampa se risulta più comoda. Utilizzare una chiave da 10 mm per il fissaggio e fare attenzione ai bordi affilati intorno ai fori del tubo della maniglia quando viene rimosso. Non stringere eccessivamente.

Installazione

1. Posizionare la rampa in modo che il bordo poggi sulla soglia (fig.1).
2. Assicurarsi che la rampa non si smonti durante l'uso. Controllare che la rampa sia ben posizionata e stabile ad ogni utilizzo. Fare attenzione quando si usa la rampa, in modo che nessuna parte della sedia a rotelle si agganci e la sposti.
3. Per trasportare la rampa, utilizzare la maniglia di trasporto a scomparsa (fig.2).

Manutenzione

- Se la rampa si danneggia / diventa scivolosa non deve essere utilizzata (contatta il fornitore).
- Le rampe possono essere pulite con normali prodotti detergenti e lasciate ad asciugare prima dell'uso.
- Temperatura massima di pulizia raccomandata 50°C; si prega di informarsi per ulteriori dettagli riguardanti la pulizia con macchine industriali.

Riciclaggio

- Per lo smaltimento di questo prodotto, rivolgersi a un'impresa di riciclaggio dei metalli.
- Tutti i materiali delle rampe sono riciclabili al 100%. Rimuovere tutti i dettagli in gomma e inviare le parti in alluminio al riciclaggio dei metalli.
- Se non avete più bisogno di questo prodotto e vi è stato fornito da un ente locale, contattatelo per discutere della sua rimozione dalla vostra proprietà.

Garanzia

- Le rampe sono coperte da una garanzia completa di 2 anni per un uso normale, a seconda delle condizioni.
- L'uso diverso da quello pubblicato/previsto annullerà la garanzia.
- Le rampe non sono progettate per un permanente uso all'esterno e non devono essere fissate.
- Qualsiasi modifica/riparazione diversa dal produttore annullerà la garanzia.



RampCentre is a registered trademark of Enable Access, LU7 4UH. We undertake a policy of continual review and research, which may lead to changes in product appearance and specification. Date of Issue: 15 August 2022

Enable Access, Unit R, Cherrycourt Way, Leighton Buzzard, LU7 4UH, UK.

EC REP Enable Access Global Ltd, 27 Phibsboro Place, Dublin 7, D07 V20, Republic of Ireland

For technical support or details on your nearest stockist please call 020 8275 0375

doorline-multi™

Istruzioni per l'uso

Codici dei prodotti: DM5, DM7

Doorline-multi Key Product Information

Code	Max Recom. Height	Length	Width	Capacity kg (lbs)	Weight kg (lbs)
DM5	10cm (4ins)	57.5cm (23ins)	70cm (28ins)	300 (661)	3.8 (8.4)
DM7	13cm (5.1ins)	74.5cm (31ins)	70cm (28ins)	300 (661)	4.7 (15)

Inclinazione


2 Quanto è ripido?

1:6 (10')		Height	Accettabile in alcuni casi per l'accesso assistito e sedie a rotelle elettriche
1:8 (8')		Height	Un buon equilibrio tra inclinazione e uso dello spazio, adatto per eventi ecc.
1:12 (5')		Height	Spesso richiesto dai servizi sociali/autorità locali. Requisiti minimi Building Regs Doc M per rampe installate
1:15 (4')		Height	Talvolta richiesto dai servizi sociali/autorità locali per accesso indipendente

Ricorda: "Più lunga è la rampa, più facile è la discesa"

3 Lunghezza

a. Misura l'altezza del gradino/differenza di livello (l'altezza tot. dai gradini o altezza al punto di riposo del veicolo)

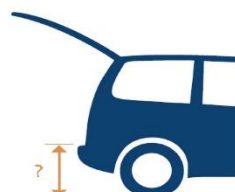

b. Usa la Guida Lunghezza Rampa per stabilire la lunghezza di cui hai bisogno

Guida Lunghezza Rampa

Altezza gradino / differenza di livello (fino a)	Lunghezza a 1:6	Lunghezza a 1:8	Lunghezza a 1:12
10cm (4")	60cm (2')	80cm (2' 7")	120cm (3' 11")
15cm (6")	90cm (2' 11")	120cm (3' 11")	180cm (5' 11")
20cm (8")	120cm (3' 11")	160cm (5' 3")	240cm (7' 10")
25cm (10")	150cm (4' 11")	200cm (6' 7")	300cm (9' 10")
30cm (1')	180cm (5' 11")	240cm (7' 10")	360cm (11' 10")
45cm (1' 6")	270cm (8' 10")	360cm (11' 10")	540cm (17' 9")
60cm (2')	360cm (11' 10")	480cm (15' 9")	720cm (23' 7")