

# The *butterfly* ramp™

## Gebrauchsanweisung

Produkt-Codes: DVBM, DVBL



**Der Verwendungszweck des Produkts:** Die Butterfly Ramp von Enable Access wurde entwickelt, um eine vielseitige und benutzerfreundliche Schwellenbrückenlösung für Personen mit Mobilitätsbedürfnissen zu bieten. Diese innovative Rampe passt sich automatisch an verschiedene Schwellenhöhen und -typen an, ohne dass der Benutzer manuelle Einstellungen vornehmen muss. Sein niedriges Profil sorgt für ein flaches und sicheres Gefälle und ist daher für alle Arten von Mobilitätshilfen geeignet. Die Rampe verfügt über eine rutschfeste Oberfläche über die gesamte Breite, die sich für einen sicheren und bequemen Transport nach innen klappen lässt und mit integrierten Komfort-Tragegriffen ausgestattet ist. Die in zwei Größen erhältliche Butterfly Ramp kann Schwellen bis zu 15 cm aufnehmen und unterstützt eine Gewichtskapazität von bis zu 350 kg. Diese Rampe ist ideal, um in einer Vielzahl von Umgebungen einen einfachen und sicheren Zugang über Türschwellen zu ermöglichen.

### Vor Gebrauch


- Entfernen Sie alle Verpackungen und bewahren Sie diese auf
- Stellen Sie sicher, dass die Rampe beim Transport nicht beschädigt wurde
- Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie die Rampe benutzen. Anweisungen zum späteren Nachlesen aufbewahren
- Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund auf beiden Seiten fest, stabil und für die vorgesehene Belastung geeignet ist

### Einsatz

1. Verwenden Sie zum Tragen der Rampe den speziellen fingerfreundlichen Tragegriff.



2. Positionieren Sie die Rampe so, dass sie die Schwelle überbrückt. Das Mittelstück der Butterfly-Rampe muss flach und eben auf der Schwelle aufliegen.

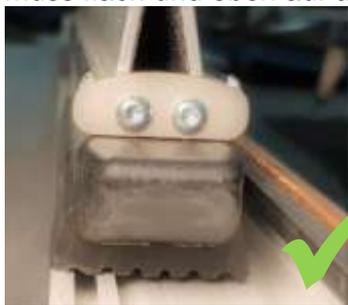

3. Die Gummilippen an beiden Seiten der Rampe müssen fest auf der ebenen Fläche aufliegen.



# The *butterfly* ramp™

## Gebrauchsanweisung

Produkt-Codes: DVBM, DVBL

4. Die Butterfly-Rampe kann die Türschwelle an Doppeltüren sicher überspannen.



5. Stellen Sie sicher, dass sich die Rampe bei Benutzung nicht verschiebt. Vergewissern Sie sicher, dass die Rampe fest und stabil steht, wenn Sie sie benutzen. Achten Sie bei Benutzung der Rampe darauf, dass kein Teil des Hilfsmittels an der Rampe hängen bleibt und diese verschiebt.

### Wartung

- Wenn die Rampe in irgendeiner Weise beschädigt/rutschig ist, sollte sie nicht benutzt werden
- Die Rampe kann mit normalen Reinigungsmitteln gereinigt und vor dem Gebrauch trocknen gelassen werden
- Maximale empfohlene Reinigungstemperatur 50°C; bitte fragen Sie nach weiteren Details zur Verwendung mit industriellen Reinigungsmaschinen

### Recycling

- Wenn Sie dieses Produkt nicht mehr benötigen, setzen Sie sich bitte mit dem Fachhandel, von dem sie die Rampe erhalten bzw. bezogen haben in Verbindung
- Alle Materialien der Rampe sind zu 100 % recycelbar. Entfernen Sie alle Gummiteile und führen Sie die Aluminiumteile dem Metallrecycling zu

### Garantie

- Die Rampe hat eine umfassende 2-Jahres-Garantie bei normaler Nutzung, es gelten die Bedingungen
- Eine andere als die veröffentlichte/beabsichtigte Verwendung führt zum Erlöschen der Garantie
- Die Rampe ist nicht für den dauerhaften Gebrauch im Freien konzipiert und darf nicht befestigt werden
- Jede Modifizierung/Reparatur, die nicht vom Hersteller vorgenommen wird, führt zum Erlöschen der Garantie





Celebrating over  
**20 YEARS**  
of better access  
for better living



# The *butterfly* ramp™

## Gebrauchsanweisung

Produkt-Codes: DVBM, DVBL

### Wichtige Produktinformationen

Code	Höhenüberwindung	Breite	Belastbar	Gewicht	Maße gefaltet (L x B x T)
<b>DVBM</b>	0cm -10cm	70cm	350kg	6.8kg	70 x 48 x 4cm
<b>DVBL</b>	0cm – 15cm	70cm	350kg	9.1kg	70 x 63 x 4cm



RampCentre is a registered trademark of Enable Access, LU7 4UH. We undertake a policy of continual review and research, which may lead to changes in product appearance and specification. Date of Issue: 15 August 2022



Enable Access, Unit R, Cherrycourt Way, Leighton Buzzard, LU7 4UH, UK.



Enable Access Global Ltd, 27 Phibsboro Place, Dublin 7, D07 V20, Republic of Ireland



**For technical support or details on your nearest stockist please call 020 8275 0375**