

doorline-variwedge™ Large (DVWL)

*3 tailles disponibles : petite, moyenne et grande pour les seuils jusqu'à 10 cm (4").



rampCENTRE™

Objectif visé: Ces rampes sont destinées à être utilisées comme accessoire de fauteuil roulant pour les personnes handicapées afin de naviguer dans des zones de différentes hauteurs.

Avant l'utilisation: Retirez et conservez tous les emballages • Lisez entièrement les instructions avant d'utiliser les rampes. • Assurez-vous que la surface est ferme, stable et capable de supporter la charge prévue. • La capacité de la rampe est de 300kg (47st). ⚠ Note: Les rampes peuvent avoir des bords tranchants. Portez des gants lors de l'assemblage

Vérifiez et familiarisez-vous avec le contenu : 1x rampe Variwedge Large, 1x pied Variwedge Large, 3x verrous encastrés Variwedge, 3x écrous à bride Variwedge, 1x clé de 10mm, 1 Bande d'étanchéité auto-adhésive en caoutchouc

Montage

- Mesurez la hauteur du seuil et choisissez la configuration qui convient (image 1).
 - Veuillez noter que le pied n'est pas utilisé pour le réglage minimum. Conservez les fixations pour une réutilisation/un réglage ultérieur.
- Assemblez la rampe et le pied VariWedge selon vos besoins.
 - Veuillez noter que le réglage de 6 cm (2,4") utilise les trous des verrous encastrés les plus bas du pied et que le réglage le plus élevé de 10 cm (4") utilise les trous des verrous encastrés les plus hauts de ce pied. Les réglages de hauteur se font par incréments de 0,5 cm.
 - Insérez le verrou encastré dans le trou correspondant à l'une des extrémités du pied (image 2). (Le réglage intermédiaire utilise les trous de verrous encastrés inférieurs et le réglage supérieur utilise les trous de verrous encastrés supérieurs du pied).
 - Insérez le boulon saillant dans le trou correspondant de la face arrière de la rampe (image 3). Vissez l'écrou à bride sur ce boulon et serrez-le manuellement (image 4).
 - Insérez les verrous encastrés à mi-chemin et à l'extrémité dans les trous correspondants (en vous assurant que la rampe et le pied sont parallèles), ajoutez et serrez à la main l'écrou à bride. Serrez les 3 écrous avec la clé fournie. (image 4.)
- Positionnez/fixez la rampe selon vos besoins
 - La bande de caoutchouc en mousse peut être appliquée sur la partie inférieure de la rampe pour agripper et protéger la surface du sol. S'assurer que la surface de la rampe est propre avant de l'appliquer.
 - Il y a 2 trous dans la surface de la rampe pour la fixer selon les besoins (fixations non fournies).
 - La rampe et le pied ont des trous de serrure qui peuvent être utilisés pour positionner la rampe à partir de vis correctement placées dans le seuil.

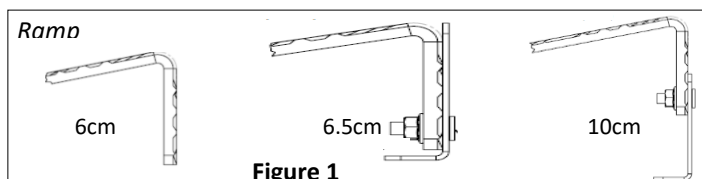
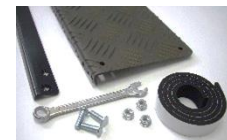


Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4

Entretien: Si les rampes sont endommagées ou glissantes, elles ne doivent pas être utilisées. Les rampes peuvent être nettoyées avec des produits de nettoyage normaux.

Recyclage: Pour éliminer ce produit, contactez une entreprise de recyclage des métaux. Si vous ne souhaitez plus utiliser ce produit et que celui-ci vous a été prêté par une autorité locale, veuillez la contacter pour discuter de son retrait de votre propriété.