

doorline-variwedge™ Medium* (DVWM)

*3 misure disponibili: piccola, media e grande per soglie fino a 10 cm (4 pollici)



rampCENTRE™

Scopo previsto: Queste rampe sono destinate ad essere utilizzate come accessorio per sedie a rotelle per le persone con disabilità per navigare in aree di diverse altezze.

Prima dell'uso: Rimuovere e conservare tutto l'imballaggio • Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. • Assicurarsi che la superficie sia solida, stabile e in grado di sopportare il carico previsto. • La capacità della rampa è di 300 kg (47st). ⚠️Nota: le rampe possono avere bordi taglienti. Indossare guanti durante l'assemblaggio

Verificare e familiarizzarsi con il contenuto: 1x rampa Variwedge Medium, 1x gamba Variwedge Medium, 3x Variwedge bulloni a filo, 3x dadi flangiati Variwedge, 1x chiave da 10mm, 1 nastro autoadesivo in gommapiuma

Montaggio:

- Misurare l'altezza dell'ingresso e scegliere la configurazione adeguata (fig. 1).
 - Si noti che la gamba non viene utilizzata per la regolazione più bassa. Conservare gli elementi di fissaggio per un futuro riutilizzo/regolazione.
- Assemblare la rampa VariWedge e la gamba come richiesto.
 - Nota bene: la regolazione di 4cm (1.6") utilizza i fori per i bulloni a filo più bassi nella gamba e la regolazione più alta di 10 cm (4") utilizza i fori per bulloni a filo più alti nella gamba. Le regolazioni dell'altezza sono da intendersi in incrementi di 0,5 cm.
 - Inserire il bullone a filo nel foro corrispondente a una delle estremità della gamba (fig. 2).
(la regolazione intermedia utilizza i fori per i bulloni a filo inferiori e la regolazione più alta utilizza i fori per i bulloni a filo superiori della gamba)
 - Inserire il bullone sporgente nel foro corrispondente sul lato posteriore della rampa (fig. 3). Avvitare il dado flangiato sul bullone e stringere manualmente (fig. 4).
 - Inserire i bulloni a filo intermedi e finali nei fori corrispondenti (assicurandosi che rampa e gamba siano parallele), aggiungere e stringere manualmente il dado della flangia. Serrare tutti i 3 dadi con la chiave in dotazione.
- Posizionare/fissare la rampa come richiesto
 - La striscia di gommapiuma può essere applicata sul lato inferiore della rampa per fare presa e proteggere la superficie del pavimento. Assicurarsi che la superficie della rampa sia pulita prima dell'applicazione.
 - Sulla superficie della rampa sono presenti 2 fori per il fissaggio (i fissaggi non sono forniti).
 - La rampa e la gamba sono dotate di appositi fori dove introdurre la chiave che possono essere utilizzati per posizionare la rampa con delle viti correttamente distanziate nella soglia.

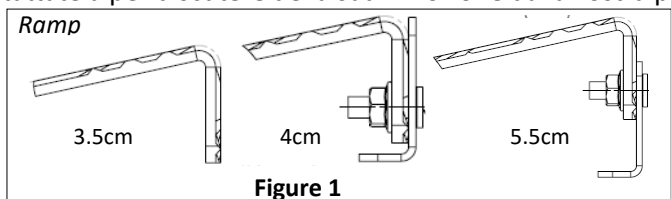


Figure 1

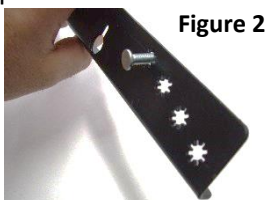


Figure 2



Figure 3

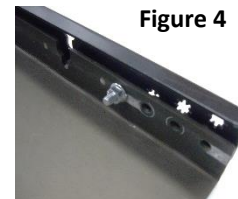


Figure 4

Manutenzione: Se le rampe sono danneggiate o scivolose in qualsiasi modo, non devono essere utilizzate. Le rampe possono essere pulite con normali prodotti per la pulizia.

Riciclaggio: Se non avete più bisogno di questo prodotto, contattate un'impresa di riciclaggio dei metalli. Se questo prodotto vi è stato prestato da un'autorità locale, contattatela per discutere della sua rimozione dalla vostra proprietà.